

Luiz Guilherme Sartori & Cia Ltda. - CNPJ: 04.861.623/0001-00

Avenida Brasil, nº. 13500 – Ajapi – Rio Claro/SP – Resp. Téc.: Sérgio R.A.de Oliveira CREA/SP: 5070105936

Visando a praticidade e a facilidade de ter acesso às informações contidas nas Instruções de Uso de nossos produtos, a Sartori Instrumentos, Implantes e Fixadores em acordo com a RDC 751/2022 estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os documentos para download no site:

http://www.sartori.ind.br/instrucao_uso

Importante: Verifique a versão da Instrução de Uso indicado no rótulo do produto, juntamente com o nº do registro e clique em "Baixar" no documento desejado para iniciar a transferência do arquivo.

Para obter a Instrução de Uso impressa sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone +55 (19) 3538-1910 ou pelo e-mail

info@sartori.ind.br.

Instrução de Uso

Lâminas de Shaver

Registro ANVISA nº 80083650079 - Revisão 03

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Nome Técnico: Instrumentos Cirúrgicos

Nome Comercial: Lâminas de Shaver

Matéria Prima: Aço Inox / ABS/PC

Produto Estéril

Método de Esterilização: Óxido de Etileno - ETO

Validade: 5 anos da data de fabricação

Produto de Uso Único - PROIBIDO REPROCESSAR

FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Os modelos comerciais que compõem a família das Lâminas de Shaver são disponibilizados para comercialização embalados unitariamente e esterilizados por Óxido de Etileno - ETO.

Os produtos são embalados em embalagem única tipo Blister (embalagem primária), e acondicionados em embalagem externa de papel duro (embalagem secundária).

Na superfície da embalagem secundária contém rótulo com informações que identificam o produto, como código, descrição, número de lote, número do registro do produto na ANVISA etc.

Na superfície da embalagem também apresenta as seguintes informações: Instrução de Uso disponível em http://www.sartori.ind.br/instrucao_uso. Reg. ANVISA: 800836500XX - Revisão: XX. Para obter a versão impressa, contatar: Fone: +55 19 3538-1910 - info@sartori.ind.br. Informações que estão em conformidade com a RDC 751/2022, que estabelece regras para disponibilização de Instruções de Uso em formato não impresso de produtos para saúde.

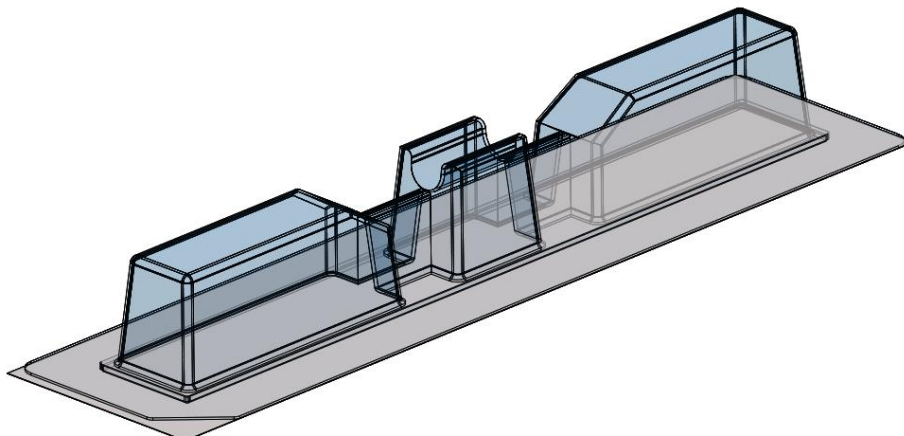


Imagem ilustrativa do conjunto blister (embalagem primária)




Imagem ilustrativa do conjunto blister (embalagem primária)

 Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA CNPJ: 04.861.623/0001-00		MD	
Avenida Brasil, 13.500, Bairro Ajapi, Rio Claro SP CEP 13508-500 Resp.Téc.- Sérgio R.A. Oliveira CREA/SP: 5070105936			
REF	5861129-011	LOT	20814S
QTD	1	Validade	15/05/2029
15/05/24			
LAMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.2,9X90MM			
Nome Comercial: LAMINAS DE SHAVER Nome Técnico: INSTRUMENTOS CIRURGICOS Material: ACO INOX / ABS/PC			
Atenção: Instrução de uso disponível em http://sartori.ind.br/instrucao_uso Reg. Anvisa: 80083650079 I.U. Revisão: XX Para obter a versão impressa sem custo de emissão e envio, contatar +55 19 3538-1910 - info@sartori.ind.br			
PRODUTO DE USO ÚNICO - PROIBIDO REPROCESSAR			
PRODUTO ESTÉRIL - ETO			
Consultar a Instrução de Uso para maiores informações sobre condições de armazenamento, precauções, instruções e indicações de legendas			
		5861129-011 	
		(01)07909700194619 (17)290515 (10)20814S	

Imagem ilustrativa do rótulo do produto

SIGNIFICADO DA LEGENDA DOS SÍMBOLOS GRÁFICOS CONTIDOS NA ROTULAGEM DO PRODUTO MÉDICO:

As simbologias apresentadas nos rótulos dos dispositivos médicos estão ilustradas abaixo e seguem denominações em conformidade com a norma ABNT NBR ISO 15223-1.

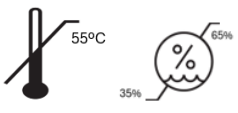	Número de catálogo (código do produto embalado)
	Quantidade do produto embalado
	Código de remessa (número de lote do produto embalado)
	Data de Fabricação
	Usar até a data (validade)
	Esterilizado com Óxido de Etileno
	Não Reusar
	Armazenar em temperatura não superior à 55°C e umidade entre 35% e 65% UR
	Consultar Instruções de uso ou consultar instruções eletrônicas de uso
	Fabricante
	Não usar se a embalagem estiver danificada e consultar as instruções de uso
	Proteger de luz solar
	Manter seco

	Frágil, manusear com cuidado
	Dispositivo médico
	Identificador único do dispositivo

ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO

Todos os produtos são acompanhados de um Alerta de Instrução de Uso, contendo todas as informações para acesso no site do fabricante, além das informações de solicitação de Instrução de Uso no formato impresso.

ALERTA DE INSTRUÇÕES DE USO

Conforme Resolução RDC 751 de 15.09.2022, que estabelece requisitos para disponibilização de Instrução de Uso em formato não impresso de dispositivos médicos, seguem neste alerta as informações para acesso das Instruções de Uso no site do fabricante do produto.

As Instruções de Uso estão disponíveis em:
https://sartori.ind.br/instrucao_uso

Para a visualização dos arquivos utilize o software Adobe Acrobat Reader. As Instruções de Uso estão indexadas no website por meio do número de Registro/ Notificação ANVISA e respectivo nome comercial (descrição do registro).

Todas as Instruções de Uso possuem o Nº do Registro/Notificação ANVISA e a revisão na primeira página do documento. O usuário deve atentar-se para a correta revisão da Instrução de Uso, informada no rótulo do produto.

Para Instrução de Uso no formato impresso, o consumidor pode solicitar sem custo adicional (inclusive de envio), por meio do telefone +55 19 3538-1910 ou do e-mail: info@sartori.ind.br.

(FSQ 095.07.01)

RASTREABILIDADE

A rastreabilidade das Lâminas de Shaver é realizada por meio das informações apresentadas nas etiquetas de rastreabilidade, nas quais estão disponíveis informações a respeito do fabricante, nome e modelo comercial do produto, número de lote, código do produto e o número de registro Anvisa, possibilitando traçar o caminho reverso até a fabricação do produto. Desse modo é possível verificar a matéria-prima, seus fornecedores e informações sobre os controles de qualidade realizados do início ao fim do processo de fabricação.

Na embalagem dos modelos comerciais são fornecidas 5 unidades de etiqueta de rastreabilidade e sua fixação é obrigatória no prontuário Clínico, no documento a ser entregue ao paciente, e na documentação fiscal que gera a cobrança.

Modelo de etiqueta de rastreabilidade das Lâminas de Shaver

Luiz Guilherme Sartori & Cia Ltda
Lote: 20814S
Código: 5861129-011
Reg.Anvisa: 80083650079
LAMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA
DIAM.2,9X90MM

Matéria-prima:
ACO INOX / ABS/PC
(01)07909700194619(17)290515(10)20814S

Fab.: 15/05/2024
Val.: 15/05/2029

A seguir imagem ilustrativa das Lâminas de Shaver:



Na tabela comparativa abaixo constam informações como o tipo de engate, tipo da ponta e a indicação de uso de cada um dos modelos comerciais que compõem a família das Lâminas de Shaver:

Imagem ilustr. Engate	Código	Descrição	Imagem ilustr. Ponta
	5861120-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.2,0X90MM	
	5861120-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.2,0X130MM	
	5861120-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.2,0X190MM	
	5861120-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.2,0X240MM	
	5861120-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.2,0X300MM	
	5861125-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.2,5X90MM	
	5861125-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.2,5X130MM	
	5861125-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.2,5X190MM	
	5861125-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.2,5X240MM	
	5861125-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.2,5X300MM	
	5861129-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.2,9X90MM	
	5861129-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.2,9X130MM	
	5861129-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.2,9X190MM	
	5861129-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.2,9X240MM	
	5861129-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.2,9X300MM	
	5861135-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.3,5X90MM	
	5861135-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.3,5X130MM	
	5861135-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.3,5X190MM	
	5861135-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.3,5X240MM	
	5861135-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO CMA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM			

Imagem ilustr. Engate	Código	Descrição	Imagem ilustr. Ponta
	5861120-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.2,0X90MM	
	5861120-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.2,0X130MM	
	5861120-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.2,0X190MM	
	5861120-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.2,0X240MM	
	5861120-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.2,0X300MM	
	5861125-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.2,5X90MM	
	5861125-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.2,5X130MM	
	5861125-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.2,5X190MM	
	5861125-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.2,5X240MM	
	5861125-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.2,5X300MM	
	5861129-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.2,9X90MM	
	5861129-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.2,9X130MM	
	5861129-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.2,9X190MM	
	5861129-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.2,9X240MM	
	5861129-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.2,9X300MM	
	5861135-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.3,5X90MM	
	5861135-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.3,5X130MM	
	5861135-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.3,5X190MM	
	5861135-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.3,5X240MM	
	5861135-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO INC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM			

Imagem ilustr. Engate	Código	Descrição	Imagem ilustr. Ponta
	5861120-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.2,0X90MM	
	5861120-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.2,0X130MM	
	5861120-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.2,0X190MM	
	5861120-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.2,0X240MM	
	5861120-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.2,0X300MM	
	5861125-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.2,5X90MM	
	5861125-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.2,5X130MM	
	5861125-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.2,5X190MM	
	5861125-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.2,5X240MM	
	5861125-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.2,5X300MM	
	5861129-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.2,9X90MM	
	5861129-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.2,9X130MM	
	5861129-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.2,9X190MM	
	5861129-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.2,9X240MM	
	5861129-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.2,9X300MM	
	5861135-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.3,5X90MM	
	5861135-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.3,5X130MM	
	5861135-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.3,5X190MM	
	5861135-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.3,5X240MM	
	5861135-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECÇÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.			

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861120-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.2,0X90MM	
	5861120-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.2,0X130MM	

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861120-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.2,0X190MM	
	5861120-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.2,0X240MM	
	5861120-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.2,0X300MM	
	5861125-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.2,5X90MM	
	5861125-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.2,5X130MM	
	5861125-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.2,5X190MM	
	5861125-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.2,5X240MM	
	5861125-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.2,5X300MM	
	5861129-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.2,9X90MM	
	5861129-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.2,9X130MM	
	5861129-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.2,9X190MM	
	5861129-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.2,9X240MM	
	5861129-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.2,9X300MM	
	5861135-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.3,5X90MM	
	5861135-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.3,5X130MM	
	5861135-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.3,5X190MM	
	5861135-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.3,5X240MM	
	5861135-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC II SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECÇÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.			

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861120-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.2,0X90MM	
	5861120-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.2,0X130MM	
	5861120-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.2,0X190MM	
	5861120-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.2,0X240MM	
	5861120-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.2,0X300MM	
	5861125-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.2,5X90MM	
	5861125-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.2,5X130MM	
	5861125-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.2,5X190MM	
	5861125-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.2,5X240MM	
	5861125-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.2,5X300MM	
	5861129-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.2,9X90MM	
	5861129-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.2,9X130MM	
	5861129-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.2,9X190MM	
	5861129-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.2,9X240MM	
	5861129-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.2,9X300MM	
	5861135-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.3,5X90MM	
	5861135-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.3,5X130MM	
	5861135-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.3,5X190MM	
	5861135-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.3,5X240MM	
	5861135-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO API SÃO INDICADAS PARA RECECÇÃO AGRESSIVA DE MENISCO, DESBRIDAMENTO ARTICULAR, E RESSECÇÃO ÓSSEA.			

Imagem ilustrativa Engate	Código		Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861120-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.2,0X90MM		
	5861120-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.2,0X130MM		
	5861120-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.2,0X190MM		
	5861120-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.2,0X240MM		
	5861120-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.2,0X300MM		
	5861125-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.2,5X90MM		
	5861125-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.2,5X130MM		
	5861125-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.2,5X190MM		
	5861125-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.2,5X240MM		
	5861125-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.2,5X300MM		
	5861129-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.2,9X90MM		
	5861129-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.2,9X130MM		
	5861129-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.2,9X190MM		
	5861129-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.2,9X240MM		
	5861129-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.2,9X300MM		
	5861135-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.3,5X90MM		
	5861135-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.3,5X130MM		
	5861135-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.3,5X190MM		
	5861135-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.3,5X240MM		
	5861135-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.3,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO APC SÃO INDICADAS PARA TODOS OS DESBRIDAMENTOS GERAIS DE TECIDOS MOLES, ESPECIALMENTE MENISCECTOMIA E CONDROPLASTIA.				

Imagem ilustrativa Engate	Código		Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861120-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.2,0X90MM		
	5861120-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.2,0X130MM		
	5861120-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.2,0X190MM		
	5861120-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.2,0X240MM		
	5861120-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.2,0X300MM		
	5861125-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.2,5X90MM		
	5861125-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.2,5X130MM		
	5861125-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.2,5X190MM		
	5861125-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.2,5X240MM		
	5861125-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.2,5X300MM		
	5861129-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.2,9X90MM		
	5861129-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.2,9X130MM		
	5861129-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.2,9X190MM		
	5861129-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.2,9X240MM		
	5861129-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.2,9X300MM		
	5861135-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.3,5X90MM		
	5861135-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.3,5X130MM		
	5861135-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.3,5X190MM		
	5861135-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.3,5X240MM		
	5861135-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.3,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO CM SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO DE MENISCO E DESBRIDAMENTO ARTICULAR				

Imagem ilustrativa Engate	Código		Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861120-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.2,0X90MM		
	5861120-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.2,0X130MM		
	5861120-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.2,0X190MM		
	5861120-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.2,0X240MM		
	5861120-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.2,0X300MM		
	5861125-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.2,5X90MM		
	5861125-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.2,5X130MM		
	5861125-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.2,5X190MM		
	5861125-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.2,5X240MM		
	5861125-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.2,5X300MM		
	5861129-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.2,9X90MM		
	5861129-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.2,9X130MM		
	5861129-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.2,9X190MM		
	5861129-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.2,9X240MM		
	5861129-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.2,9X300MM		
	5861135-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.3,5X90MM		
	5861135-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.3,5X130MM		
	5861135-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.3,5X190MM		
	5861135-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.3,5X240MM		
	5861135-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.3,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861120-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.2,0X90MM	
	5861120-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.2,0X130MM	
	5861120-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.2,0X190MM	
	5861120-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.2,0X240MM	
	5861120-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.2,0X300MM	
	5861125-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.2,5X90MM	
	5861125-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.2,5X130MM	
	5861125-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.2,5X190MM	
	5861125-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.2,5X240MM	
	5861125-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.2,5X300MM	
	5861129-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.2,9X90MM	
	5861129-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.2,9X130MM	
	5861129-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.2,9X190MM	
	5861129-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.2,9X240MM	
	5861129-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.2,9X300MM	
	5861135-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.3,5X90MM	
	5861135-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.3,5X130MM	
	5861135-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.3,5X190MM	
	5861135-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.3,5X240MM	
	5861135-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.			

Imagem ilustrativa Engate	Código		Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861120-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.2,0X90MM		
	5861120-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.2,0X130MM		
	5861120-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.2,0X190MM		
	5861120-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.2,0X240MM		
	5861120-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.2,0X300MM		
	5861125-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.2,5X90MM		
	5861125-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.2,5X130MM		
	5861125-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.2,5X190MM		
	5861125-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.2,5X240MM		
	5861125-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.2,5X300MM		
	5861129-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.2,9X90MM		
	5861129-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.2,9X130MM		
	5861129-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.2,9X190MM		
	5861129-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.2,9X240MM		
	5861129-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.2,9X300MM		
	5861135-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.3,5X90MM		
	5861135-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.3,5X130MM		
	5861135-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.3,5X190MM		
	5861135-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.3,5X240MM		
	5861135-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.3,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Imagem ilustrativa Engate	Código		Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861120-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.2,0X90MM		
	5861120-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.2,0X130MM		
	5861120-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.2,0X190MM		
	5861120-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.2,0X240MM		
	5861120-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.2,0X300MM		
	5861125-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.2,5X90MM		
	5861125-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.2,5X130MM		
	5861125-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.2,5X190MM		
	5861125-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.2,5X240MM		
	5861125-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.2,5X300MM		
	5861129-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.2,9X90MM		
	5861129-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.2,9X130MM		
	5861129-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.2,9X190MM		
	5861129-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.2,9X240MM		
	5861129-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.2,9X300MM		
	5861135-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.3,5X90MM		
	5861135-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.3,5X130MM		
	5861135-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.3,5X190MM		
	5861135-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.3,5X240MM		
	5861135-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.3,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861120-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.2,0X90MM	
	5861120-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.2,0X130MM	
	5861120-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.2,0X190MM	
	5861120-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.2,0X240MM	
	5861120-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.2,0X300MM	
	5861125-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.2,5X90MM	
	5861125-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.2,5X130MM	
	5861125-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.2,5X190MM	
	5861125-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.2,5X240MM	
	5861125-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.2,5X300MM	
	5861129-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.2,9X90MM	
	5861129-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.2,9X130MM	
	5861129-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.2,9X190MM	
	5861129-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.2,9X240MM	
	5861129-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.2,9X300MM	
	5861135-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.3,5X90MM	
	5861135-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.3,5X130MM	
	5861135-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.3,5X190MM	
	5861135-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.3,5X240MM	
	5861135-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.			

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861120-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.2,0X90MM	
	5861120-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.2,0X130MM	
	5861120-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.2,0X190MM	
	5861120-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.2,0X240MM	
	5861120-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.2,0X300MM	
	5861125-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.2,5X90MM	
	5861125-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.2,5X130MM	
	5861125-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.2,5X190MM	
	5861125-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.2,5X240MM	
	5861125-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.2,5X300MM	
	5861129-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.2,9X90MM	
	5861129-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.2,9X130MM	
	5861129-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.2,9X190MM	
	5861129-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.2,9X240MM	
	5861129-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.2,9X300MM	
	5861135-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.3,5X90MM	
	5861135-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.3,5X130MM	
	5861135-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.3,5X190MM	
	5861135-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.3,5X240MM	
	5861135-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.			

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861120-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.2,0X90MM	
	5861120-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.2,0X130MM	
	5861120-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.2,0X190MM	
	5861120-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.2,0X240MM	
	5861120-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.2,0X300MM	

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861125-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.2,5X90MM	
	5861125-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.2,5X130MM	
	5861125-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.2,5X190MM	
	5861125-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.2,5X240MM	
	5861125-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.2,5X300MM	
	5861129-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.2,9X90MM	
	5861129-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.2,9X130MM	
	5861129-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.2,9X190MM	
	5861129-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.2,9X240MM	
	5861129-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.2,9X300MM	
	5861135-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.3,5X90MM	
	5861135-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.3,5X130MM	
	5861135-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.3,5X190MM	
	5861135-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.3,5X240MM	
	5861135-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.			

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861120-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.2,0X90MM	
	5861120-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.2,0X130MM	
	5861120-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.2,0X190MM	
	5861120-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.2,0X240MM	
	5861120-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.2,0X300MM	
	5861125-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.2,5X90MM	
	5861125-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.2,5X130MM	
	5861125-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.2,5X190MM	
	5861125-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.2,5X240MM	
	5861125-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.2,5X300MM	
	5861129-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.2,9X90MM	
	5861129-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.2,9X130MM	
	5861129-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.2,9X190MM	
	5861129-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.2,9X240MM	
	5861129-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.2,9X300MM	
	5861135-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.3,5X90MM	
	5861135-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.3,5X130MM	
	5861135-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.3,5X190MM	
	5861135-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.3,5X240MM	
	5861135-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.			

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861120-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.2,0X90MM	
	5861120-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.2,0X130MM	
	5861120-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.2,0X190MM	
	5861120-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.2,0X240MM	
	5861120-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.2,0X300MM	
	5861125-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.2,5X90MM	
	5861125-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.2,5X130MM	
	5861125-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.2,5X190MM	
	5861125-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.2,5X240MM	
	5861125-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.2,5X300MM	

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861129-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.2,9X90MM	
	5861129-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.2,9X130MM	
	5861129-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.2,9X190MM	
	5861129-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.2,9X240MM	
	5861129-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.2,9X300MM	
	5861135-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.3,5X90MM	
	5861135-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.3,5X130MM	
	5861135-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.3,5X190MM	
	5861135-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.3,5X240MM	
	5861135-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.			

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.2,0X90MM	
	5861220-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.2,0X130MM	
	5861220-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.2,0X190MM	
	5861220-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.2,0X240MM	
	5861220-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.2,0X300MM	
	5861225-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.2,5X90MM	
	5861225-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.2,5X130MM	
	5861225-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.2,5X190MM	
	5861225-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.2,5X240MM	
	5861225-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.2,5X300MM	
	5861229-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.2,9X90MM	
	5861229-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.2,9X130MM	
	5861229-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.2,9X190MM	
	5861229-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.2,9X240MM	
	5861229-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.2,9X300MM	
	5861235-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.3,5X90MM	
	5861235-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.3,5X130MM	
	5861235-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.3,5X190MM	
	5861235-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.3,5X240MM	
	5861235-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO CMA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM.			

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.2,0X90MM	
	5861220-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.2,0X130MM	
	5861220-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.2,0X190MM	
	5861220-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.2,0X240MM	
	5861220-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.2,0X300MM	
	5861225-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.2,5X90MM	
	5861225-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.2,5X130MM	
	5861225-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.2,5X190MM	
	5861225-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.2,5X240MM	
	5861225-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.2,5X300MM	
	5861229-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.2,9X90MM	
	5861229-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.2,9X130MM	
	5861229-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.2,9X190MM	
	5861229-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.2,9X240MM	

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861229-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.2,9X300MM	
	5861235-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.3,5X90MM	
	5861235-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.3,5X130MM	
	5861235-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.3,5X190MM	
	5861235-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.3,5X240MM	
	5861235-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO INC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM.			

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.2,0X90MM	
	5861220-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.2,0X130MM	
	5861220-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.2,0X190MM	
	5861220-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.2,0X240MM	
	5861220-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.2,0X300MM	
	5861225-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.2,5X90MM	
	5861225-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.2,5X130MM	
	5861225-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.2,5X190MM	
	5861225-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.2,5X240MM	
	5861225-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.2,5X300MM	
	5861229-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.2,9X90MM	
	5861229-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.2,9X130MM	
	5861229-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.2,9X190MM	
	5861229-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.2,9X240MM	
	5861229-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.2,9X300MM	
	5861235-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.3,5X90MM	
	5861235-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.3,5X130MM	
	5861235-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.3,5X190MM	
	5861235-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.3,5X240MM	
	5861235-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECÇÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.			

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.2,0X90MM	
	5861220-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.2,0X130MM	
	5861220-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.2,0X190MM	
	5861220-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.2,0X240MM	
	5861220-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.2,0X300MM	
	5861225-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.2,5X90MM	
	5861225-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.2,5X130MM	
	5861225-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.2,5X190MM	
	5861225-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.2,5X240MM	
	5861225-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.2,5X300MM	
	5861229-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.2,9X90MM	
	5861229-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.2,9X130MM	
	5861229-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.2,9X190MM	
	5861229-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.2,9X240MM	
	5861229-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.2,9X300MM	
	5861235-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.3,5X90MM	
	5861235-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.3,5X130MM	
	5861235-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.3,5X190MM	

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861235-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.3,5X240MM	
	5861235-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC II SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECÇÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.			

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.2,0X90MM	
	5861220-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.2,0X130MM	
	5861220-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.2,0X190MM	
	5861220-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.2,0X240MM	
	5861220-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.2,0X300MM	
	5861225-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.2,5X90MM	
	5861225-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.2,5X130MM	
	5861225-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.2,5X190MM	
	5861225-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.2,5X240MM	
	5861225-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.2,5X300MM	
	5861229-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.2,9X90MM	
	5861229-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.2,9X130MM	
	5861229-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.2,9X190MM	
	5861229-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.2,9X240MM	
	5861229-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.2,9X300MM	
	5861235-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.3,5X90MM	
	5861235-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.3,5X130MM	
	5861235-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.3,5X190MM	
	5861235-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.3,5X240MM	
	5861235-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.3,5X300MM	
LÂMINAS COM PONTAS TIPO API SÃO INDICADAS PARA RESECÇÃO AGRESSIVA DE MENISCO, DESBRIDAMENTO ARTICULAR, E RESSECÇÃO ÓSSEA.			

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.2,0X90MM	
	5861220-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.2,0X130MM	
	5861220-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.2,0X190MM	
	5861220-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.2,0X240MM	
	5861220-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.2,0X300MM	
	5861225-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.2,5X90MM	
	5861225-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.2,5X130MM	
	5861225-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.2,5X190MM	
	5861225-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.2,5X240MM	
	5861225-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.2,5X300MM	
	5861229-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.2,9X90MM	
	5861229-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.2,9X130MM	
	5861229-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.2,9X190MM	
	5861229-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.2,9X240MM	
	5861229-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.2,9X300MM	
	5861235-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.3,5X90MM	
	5861235-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.3,5X130MM	
	5861235-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.3,5X190MM	
	5861235-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.3,5X240MM	
	5861235-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.3,5X300MM	

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO APC SÃO INDICADAS PARA TODOS OS DESBRIDAMENTOS GERAIS DE TECIDOS MOLES, ESPECIALMENTE MENISCECTOMIA E CONDROPLASTIA.			

Imagem ilustrativa Engate	Código		Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.2,0X90MM		
	5861220-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.2,0X130MM		
	5861220-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.2,0X190MM		
	5861220-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.2,0X240MM		
	5861220-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.2,0X300MM		
	5861225-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.2,5X90MM		
	5861225-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.2,5X130MM		
	5861225-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.2,5X190MM		
	5861225-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.2,5X240MM		
	5861225-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.2,5X300MM		
	5861229-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.2,9X90MM		
	5861229-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.2,9X130MM		
	5861229-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.2,9X190MM		
	5861229-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.2,9X240MM		
	5861229-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.2,9X300MM		
	5861235-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.3,5X90MM		
	5861235-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.3,5X130MM		
	5861235-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.3,5X190MM		
	5861235-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.3,5X240MM		
	5861235-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.3,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO CM SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO DE MENISCO E DESBRIDAMENTO ARTICULAR				

Imagem ilustrativa Engate	Código		Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.2,0X90MM		
	5861220-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.2,0X130MM		
	5861220-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.2,0X190MM		
	5861220-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.2,0X240MM		
	5861220-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.2,0X300MM		
	5861225-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.2,5X90MM		
	5861225-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.2,5X130MM		
	5861225-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.2,5X190MM		
	5861225-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.2,5X240MM		
	5861225-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.2,5X300MM		
	5861229-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.2,9X90MM		
	5861229-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.2,9X130MM		
	5861229-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.2,9X190MM		
	5861229-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.2,9X240MM		
	5861229-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.2,9X300MM		
	5861235-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.3,5X90MM		
	5861235-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.3,5X130MM		
	5861235-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.3,5X190MM		
	5861235-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.3,5X240MM		
	5861235-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.3,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Imagem ilustrativa Engate	Código		Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.2,0X90MM		
	5861220-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.2,0X130MM		
	5861220-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.2,0X190MM		
	5861220-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.2,0X240MM		
	5861220-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.2,0X300MM		
	5861225-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.2,5X90MM		
	5861225-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.2,5X130MM		
	5861225-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.2,5X190MM		
	5861225-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.2,5X240MM		
	5861225-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.2,5X300MM		
	5861229-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.2,9X90MM		
	5861229-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.2,9X130MM		
	5861229-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.2,9X190MM		
	5861229-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.2,9X240MM		
	5861229-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.2,9X300MM		
	5861235-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.3,5X90MM		
	5861235-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.3,5X130MM		
	5861235-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.3,5X190MM		
	5861235-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.3,5X240MM		
	5861235-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.3,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.2,0X90MM	
	5861220-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.2,0X130MM	
	5861220-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.2,0X190MM	
	5861220-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.2,0X240MM	
	5861220-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.2,0X300MM	
	5861225-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.2,5X90MM	
	5861225-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.2,5X130MM	
	5861225-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.2,5X190MM	
	5861225-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.2,5X240MM	
	5861225-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.2,5X300MM	
	5861229-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.2,9X90MM	
	5861229-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.2,9X130MM	
	5861229-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.2,9X190MM	
	5861229-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.2,9X240MM	
	5861229-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.2,9X300MM	
	5861235-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.3,5X90MM	
	5861235-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.3,5X130MM	
	5861235-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.3,5X190MM	
	5861235-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.3,5X240MM	
	5861235-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.			

Imagem ilustrativa Engate	Código		Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.2,0X90MM		
	5861220-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.2,0X130MM		
	5861220-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.2,0X190MM		
	5861220-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.2,0X240MM		
	5861220-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.2,0X300MM		
	5861225-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.2,5X90MM		
	5861225-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.2,5X130MM		
	5861225-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.2,5X190MM		
	5861225-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.2,5X240MM		
	5861225-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.2,5X300MM		
	5861229-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.2,9X90MM		
	5861229-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.2,9X130MM		
	5861229-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.2,9X190MM		
	5861229-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.2,9X240MM		
	5861229-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.2,9X300MM		
	5861235-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.3,5X90MM		
	5861235-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.3,5X130MM		
	5861235-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.3,5X190MM		
	5861235-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.3,5X240MM		
	5861235-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.3,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.2,0X90MM	
	5861220-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.2,0X130MM	
	5861220-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.2,0X190MM	
	5861220-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.2,0X240MM	
	5861220-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.2,0X300MM	
	5861225-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.2,5X90MM	
	5861225-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.2,5X130MM	
	5861225-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.2,5X190MM	
	5861225-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.2,5X240MM	
	5861225-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.2,5X300MM	
	5861229-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.2,9X90MM	
	5861229-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.2,9X130MM	
	5861229-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.2,9X190MM	
	5861229-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.2,9X240MM	
	5861229-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.2,9X300MM	
	5861235-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.3,5X90MM	
	5861235-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.3,5X130MM	
	5861235-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.3,5X190MM	
	5861235-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.3,5X240MM	
	5861235-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.			

Imagem ilustrativa Engate	Código		Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.2,0X90MM		
	5861220-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.2,0X130MM		
	5861220-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.2,0X190MM		
	5861220-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.2,0X240MM		
	5861220-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.2,0X300MM		
	5861225-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.2,5X90MM		
	5861225-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.2,5X130MM		
	5861225-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.2,5X190MM		
	5861225-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.2,5X240MM		
	5861225-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.2,5X300MM		
	5861229-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.2,9X90MM		
	5861229-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.2,9X130MM		
	5861229-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.2,9X190MM		
	5861229-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.2,9X240MM		
	5861229-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.2,9X300MM		
	5861235-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.3,5X90MM		
	5861235-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.3,5X130MM		
	5861235-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.3,5X190MM		
	5861235-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.3,5X240MM		
	5861235-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.3,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.2,0X90MM	
	5861220-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.2,0X130MM	
	5861220-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.2,0X190MM	
	5861220-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.2,0X240MM	
	5861220-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.2,0X300MM	
	5861225-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.2,5X90MM	
	5861225-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.2,5X130MM	
	5861225-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.2,5X190MM	
	5861225-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.2,5X240MM	
	5861225-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.2,5X300MM	
	5861229-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.2,9X90MM	
	5861229-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.2,9X130MM	
	5861229-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.2,9X190MM	
	5861229-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.2,9X240MM	
	5861229-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.2,9X300MM	
	5861235-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.3,5X90MM	
	5861235-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.3,5X130MM	
	5861235-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.3,5X190MM	
	5861235-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.3,5X240MM	
	5861235-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.			

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.2,0X90MM	
	5861220-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.2,0X130MM	
	5861220-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.2,0X190MM	
	5861220-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.2,0X240MM	
	5861220-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.2,0X300MM	
	5861225-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.2,5X90MM	
	5861225-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.2,5X130MM	
	5861225-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.2,5X190MM	
	5861225-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.2,5X240MM	
	5861225-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.2,5X300MM	
	5861229-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.2,9X90MM	
	5861229-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.2,9X130MM	
	5861229-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.2,9X190MM	
	5861229-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.2,9X240MM	
	5861229-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.2,9X300MM	
	5861235-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.3,5X90MM	
	5861235-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.3,5X130MM	
	5861235-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.3,5X190MM	
	5861235-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.3,5X240MM	
	5861235-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.			

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.2,0X90MM	
	5861220-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.2,0X130MM	
	5861220-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.2,0X190MM	
	5861220-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.2,0X240MM	
	5861220-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.2,0X300MM	
	5861225-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.2,5X90MM	
	5861225-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.2,5X130MM	
	5861225-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.2,5X190MM	
	5861225-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.2,5X240MM	
	5861225-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.2,5X300MM	
	5861229-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.2,9X90MM	
	5861229-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.2,9X130MM	
	5861229-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.2,9X190MM	
	5861229-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.2,9X240MM	
	5861229-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.2,9X300MM	
	5861235-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.3,5X90MM	
	5861235-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.3,5X130MM	
	5861235-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.3,5X190MM	
	5861235-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.3,5X240MM	
	5861235-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.			

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.2,0X90MM	
	5861320-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.2,0X130MM	
	5861320-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.2,0X190MM	
	5861320-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.2,0X240MM	
	5861320-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.2,0X300MM	
	5861325-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.2,5X90MM	
	5861325-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.2,5X130MM	
	5861325-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.2,5X190MM	
	5861325-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.2,5X240MM	
	5861325-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.2,5X300MM	
	5861329-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.2,9X90MM	
	5861329-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.2,9X130MM	
	5861329-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.2,9X190MM	
	5861329-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.2,9X240MM	
	5861329-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.2,9X300MM	
	5861335-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.3,5X90MM	
	5861335-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.3,5X130MM	
	5861335-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.3,5X190MM	
	5861335-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.3,5X240MM	
	5861335-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.3,5X300MM	

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO CMA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.2,0X90MM	
	5861320-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.2,0X130MM	
	5861320-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.2,0X190MM	
	5861320-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.2,0X240MM	
	5861320-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.2,0X300MM	
	5861325-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.2,5X90MM	
	5861325-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.2,5X130MM	
	5861325-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.2,5X190MM	
	5861325-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.2,5X240MM	
	5861325-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.2,5X300MM	
	5861329-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.2,9X90MM	
	5861329-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.2,9X130MM	
	5861329-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.2,9X190MM	
	5861329-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.2,9X240MM	
	5861329-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.2,9X300MM	
	5861335-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.3,5X90MM	
	5861335-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.3,5X130MM	
	5861335-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.3,5X190MM	
	5861335-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.3,5X240MM	
	5861335-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO INC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM.			

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.2,0X90MM	
	5861320-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.2,0X130MM	
	5861320-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.2,0X190MM	
	5861320-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.2,0X240MM	
	5861320-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.2,0X300MM	
	5861325-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.2,5X90MM	
	5861325-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.2,5X130MM	
	5861325-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.2,5X190MM	
	5861325-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.2,5X240MM	
	5861325-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.2,5X300MM	
	5861329-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.2,9X90MM	
	5861329-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.2,9X130MM	
	5861329-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.2,9X190MM	
	5861329-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.2,9X240MM	
	5861329-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.2,9X300MM	
	5861335-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.3,5X90MM	
	5861335-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.3,5X130MM	
	5861335-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.3,5X190MM	
	5861335-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.3,5X240MM	
	5861335-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.3,5X300MM	
LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECÇÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.			

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.2,0X90MM	
	5861320-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.2,0X130MM	
	5861320-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.2,0X190MM	
	5861320-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.2,0X240MM	
	5861320-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.2,0X300MM	
	5861325-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.2,5X90MM	
	5861325-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.2,5X130MM	
	5861325-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.2,5X190MM	
	5861325-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.2,5X240MM	
	5861325-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.2,5X300MM	
	5861329-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.2,9X90MM	
	5861329-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.2,9X130MM	
	5861329-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.2,9X190MM	
	5861329-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.2,9X240MM	
	5861329-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.2,9X300MM	
	5861335-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.3,5X90MM	
	5861335-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.3,5X130MM	
	5861335-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.3,5X190MM	
	5861335-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.3,5X240MM	
	5861335-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.3,5X300MM	

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC II SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECÇÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.

Imagem ilustrativa Engate	Código		Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.2,0X90MM		
	5861320-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.2,0X130MM		
	5861320-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.2,0X190MM		
	5861320-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.2,0X240MM		
	5861320-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.2,0X300MM		
	5861325-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.2,5X90MM		
	5861325-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.2,5X130MM		
	5861325-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.2,5X190MM		
	5861325-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.2,5X240MM		
	5861325-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.2,5X300MM		
	5861329-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.2,9X90MM		
	5861329-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.2,9X130MM		
	5861329-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.2,9X190MM		
	5861329-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.2,9X240MM		
	5861329-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.2,9X300MM		
	5861335-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.3,5X90MM		
	5861335-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.3,5X130MM		
	5861335-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.3,5X190MM		
	5861335-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.3,5X240MM		
	5861335-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.3,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO API SÃO INDICADAS PARA RECECÇÃO AGRESSIVA DE MENISCO, DESBRIDAMENTO ARTICULAR, E RESSECÇÃO ÓSSEA.				

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.2,0X90MM	
	5861320-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.2,0X130MM	
	5861320-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.2,0X190MM	
	5861320-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.2,0X240MM	
	5861320-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.2,0X300MM	
	5861325-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.2,5X90MM	
	5861325-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.2,5X130MM	
	5861325-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.2,5X190MM	
	5861325-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.2,5X240MM	
	5861325-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.2,5X300MM	
	5861329-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.2,9X90MM	
	5861329-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.2,9X130MM	
	5861329-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.2,9X190MM	
	5861329-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.2,9X240MM	
	5861329-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.2,9X300MM	
	5861335-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.3,5X90MM	
	5861335-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.3,5X130MM	
	5861335-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.3,5X190MM	
	5861335-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.3,5X240MM	
	5861335-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO APC SÃO INDICADAS PARA TODOS OS DESBRIDAMENTOS GERAIS DE TECIDOS MOLES, ESPECIALMENTE MENISCECTOMIA E CONDROPLASTIA.			

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.2,0X90MM	
	5861320-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.2,0X130MM	
	5861320-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.2,0X190MM	
	5861320-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.2,0X240MM	
	5861320-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.2,0X300MM	
	5861325-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.2,5X90MM	
	5861325-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.2,5X130MM	
	5861325-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.2,5X190MM	
	5861325-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.2,5X240MM	
	5861325-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.2,5X300MM	
	5861329-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.2,9X90MM	
	5861329-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.2,9X130MM	
	5861329-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.2,9X190MM	
	5861329-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.2,9X240MM	
	5861329-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.2,9X300MM	
	5861335-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.3,5X90MM	
	5861335-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.3,5X130MM	
	5861335-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.3,5X190MM	
	5861335-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.3,5X240MM	
	5861335-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.3,5X300MM	
LÂMINAS COM PONTAS TIPO CM SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO DE MENISCO E DESBRIDAMENTO ARTICULAR			

Imagem ilustrativa Engate	Código		Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.2,0X90MM		
	5861320-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.2,0X130MM		
	5861320-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.2,0X190MM		
	5861320-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.2,0X240MM		
	5861320-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.2,0X300MM		
	5861325-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.2,5X90MM		
	5861325-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.2,5X130MM		
	5861325-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.2,5X190MM		
	5861325-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.2,5X240MM		
	5861325-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.2,5X300MM		
	5861329-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.2,9X90MM		
	5861329-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.2,9X130MM		
	5861329-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.2,9X190MM		
	5861329-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.2,9X240MM		
	5861329-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.2,9X300MM		
	5861335-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.3,5X90MM		
	5861335-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.3,5X130MM		
	5861335-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.3,5X190MM		
	5861335-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.3,5X240MM		
	5861335-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.3,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.2,0X90MM	
	5861320-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.2,0X130MM	
	5861320-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.2,0X190MM	
	5861320-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.2,0X240MM	
	5861320-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.2,0X300MM	
	5861325-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.2,5X90MM	
	5861325-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.2,5X130MM	
	5861325-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.2,5X190MM	
	5861325-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.2,5X240MM	
	5861325-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.2,5X300MM	
	5861329-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.2,9X90MM	
	5861329-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.2,9X130MM	
	5861329-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.2,9X190MM	
	5861329-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.2,9X240MM	
	5861329-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.2,9X300MM	
	5861335-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.3,5X90MM	
	5861335-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.3,5X130MM	
	5861335-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.3,5X190MM	
	5861335-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.3,5X240MM	
	5861335-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.			

Imagem ilustrativa Engate	Código		Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.2,0X90MM		
	5861320-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.2,0X130MM		
	5861320-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.2,0X190MM		
	5861320-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.2,0X240MM		
	5861320-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.2,0X300MM		
	5861325-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.2,5X90MM		
	5861325-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.2,5X130MM		
	5861325-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.2,5X190MM		
	5861325-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.2,5X240MM		
	5861325-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.2,5X300MM		
	5861329-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.2,9X90MM		
	5861329-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.2,9X130MM		
	5861329-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.2,9X190MM		
	5861329-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.2,9X240MM		
	5861329-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.2,9X300MM		
	5861335-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.3,5X90MM		
	5861335-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.3,5X130MM		
	5861335-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.3,5X190MM		
	5861335-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.3,5X240MM		
	5861335-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.3,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.2,0X90MM	
	5861320-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.2,0X130MM	
	5861320-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.2,0X190MM	
	5861320-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.2,0X240MM	
	5861320-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.2,0X300MM	
	5861325-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.2,5X90MM	
	5861325-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.2,5X130MM	
	5861325-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.2,5X190MM	
	5861325-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.2,5X240MM	
	5861325-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.2,5X300MM	
	5861329-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.2,9X90MM	
	5861329-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.2,9X130MM	
	5861329-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.2,9X190MM	
	5861329-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.2,9X240MM	
	5861329-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.2,9X300MM	
	5861335-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.3,5X90MM	
	5861335-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.3,5X130MM	
	5861335-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.3,5X190MM	
	5861335-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.3,5X240MM	
	5861335-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.			

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.2,0X90MM	
	5861320-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.2,0X130MM	
	5861320-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.2,0X190MM	
	5861320-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.2,0X240MM	
	5861320-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.2,0X300MM	
	5861325-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.2,5X90MM	
	5861325-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.2,5X130MM	
	5861325-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.2,5X190MM	
	5861325-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.2,5X240MM	
	5861325-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.2,5X300MM	
	5861329-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.2,9X90MM	
	5861329-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.2,9X130MM	
	5861329-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.2,9X190MM	
	5861329-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.2,9X240MM	
	5861329-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.2,9X300MM	
	5861335-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.3,5X90MM	
	5861335-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.3,5X130MM	
	5861335-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.3,5X190MM	
	5861335-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.3,5X240MM	
	5861335-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.			

Imagem ilustrativa Engate	Código		Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.2,0X90MM		
	5861320-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.2,0X130MM		
	5861320-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.2,0X190MM		
	5861320-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.2,0X240MM		
	5861320-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.2,0X300MM		
	5861325-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.2,5X90MM		
	5861325-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.2,5X130MM		
	5861325-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.2,5X190MM		
	5861325-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.2,5X240MM		
	5861325-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.2,5X300MM		
	5861329-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.2,9X90MM		
	5861329-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.2,9X130MM		
	5861329-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.2,9X190MM		
	5861329-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.2,9X240MM		
	5861329-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.2,9X300MM		
	5861335-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.3,5X90MM		
	5861335-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.3,5X130MM		
	5861335-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.3,5X190MM		
	5861335-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.3,5X240MM		
	5861335-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.3,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Imagem ilustrativa Engate	Código		Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.2,0X90MM		
	5861320-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.2,0X130MM		
	5861320-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.2,0X190MM		
	5861320-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.2,0X240MM		
	5861320-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.2,0X300MM		
	5861325-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.2,5X90MM		
	5861325-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.2,5X130MM		
	5861325-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.2,5X190MM		
	5861325-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.2,5X240MM		
	5861325-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.2,5X300MM		
	5861329-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.2,9X90MM		
	5861329-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.2,9X130MM		
	5861329-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.2,9X190MM		
	5861329-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.2,9X240MM		
	5861329-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.2,9X300MM		
	5861335-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.3,5X90MM		
	5861335-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.3,5X130MM		
	5861335-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.3,5X190MM		
	5861335-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.3,5X240MM		
	5861335-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.3,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.2,0X90MM	
	5861320-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.2,0X130MM	
	5861320-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.2,0X190MM	
	5861320-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.2,0X240MM	
	5861320-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.2,0X300MM	
	5861325-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.2,5X90MM	
	5861325-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.2,5X130MM	
	5861325-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.2,5X190MM	
	5861325-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.2,5X240MM	
	5861325-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.2,5X300MM	
	5861329-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.2,9X90MM	
	5861329-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.2,9X130MM	
	5861329-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.2,9X190MM	
	5861329-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.2,9X240MM	
	5861329-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.2,9X300MM	
	5861335-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.3,5X90MM	
	5861335-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.3,5X130MM	
	5861335-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.3,5X190MM	
	5861335-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.3,5X240MM	
	5861335-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.			

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.2,0X90MM	
	5861320-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.2,0X130MM	
	5861320-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.2,0X190MM	
	5861320-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.2,0X240MM	
	5861320-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.2,0X300MM	
	5861325-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.2,5X90MM	
	5861325-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.2,5X130MM	
	5861325-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.2,5X190MM	
	5861325-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.2,5X240MM	
	5861325-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.2,5X300MM	
	5861329-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.2,9X90MM	
	5861329-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.2,9X130MM	
	5861329-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.2,9X190MM	
	5861329-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.2,9X240MM	
	5861329-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.2,9X300MM	
	5861335-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.3,5X90MM	
	5861335-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.3,5X130MM	
	5861335-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.3,5X190MM	
	5861335-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.3,5X240MM	
	5861335-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.			

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.2,0X90MM	
	5861420-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.2,0X130MM	
	5861420-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.2,0X190MM	
	5861420-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.2,0X240MM	
	5861420-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.2,0X300MM	
	5861425-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.2,5X90MM	
	5861425-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.2,5X130MM	
	5861425-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.2,5X190MM	
	5861425-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.2,5X240MM	
	5861425-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.2,5X300MM	
	5861429-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.2,9X90MM	
	5861429-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.2,9X130MM	
	5861429-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.2,9X190MM	
	5861429-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.2,9X240MM	
	5861429-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.2,9X300MM	
	5861435-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.3,5X90MM	
	5861435-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.3,5X130MM	
	5861435-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.3,5X190MM	
	5861435-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.3,5X240MM	
	5861435-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO CMA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM.			

Imagem ilustrativa Engate	Código		Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.2,0X90MM		
	5861420-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.2,0X130MM		
	5861420-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.2,0X190MM		
	5861420-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.2,0X240MM		
	5861420-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.2,0X300MM		
	5861425-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.2,5X90MM		
	5861425-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.2,5X130MM		
	5861425-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.2,5X190MM		
	5861425-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.2,5X240MM		
	5861425-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.2,5X300MM		
	5861429-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.2,9X90MM		
	5861429-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.2,9X130MM		
	5861429-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.2,9X190MM		
	5861429-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.2,9X240MM		
	5861429-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.2,9X300MM		
	5861435-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.3,5X90MM		
	5861435-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.3,5X130MM		
	5861435-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.3,5X190MM		
	5861435-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.3,5X240MM		
	5861435-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.3,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO INC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM.				

Imagem ilustrativa Engate	Código		Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.2,0X90MM		
	5861420-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.2,0X130MM		
	5861420-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.2,0X190MM		
	5861420-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.2,0X240MM		
	5861420-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.2,0X300MM		
	5861425-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.2,5X90MM		
	5861425-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.2,5X130MM		
	5861425-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.2,5X190MM		
	5861425-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.2,5X240MM		
	5861425-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.2,5X300MM		
	5861429-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.2,9X90MM		
	5861429-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.2,9X130MM		
	5861429-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.2,9X190MM		
	5861429-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.2,9X240MM		
	5861429-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.2,9X300MM		
	5861435-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.3,5X90MM		
	5861435-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.3,5X130MM		
	5861435-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.3,5X190MM		
	5861435-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.3,5X240MM		
	5861435-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.3,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECÇÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.				

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.2,0X90MM	
	5861420-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.2,0X130MM	
	5861420-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.2,0X190MM	
	5861420-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.2,0X240MM	
	5861420-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.2,0X300MM	
	5861425-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.2,5X90MM	
	5861425-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.2,5X130MM	
	5861425-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.2,5X190MM	
	5861425-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.2,5X240MM	
	5861425-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.2,5X300MM	
	5861429-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.2,9X90MM	
	5861429-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.2,9X130MM	
	5861429-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.2,9X190MM	
	5861429-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.2,9X240MM	
	5861429-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.2,9X300MM	
	5861435-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.3,5X90MM	
	5861435-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.3,5X130MM	
	5861435-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.3,5X190MM	
	5861435-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.3,5X240MM	
	5861435-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC II SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECÇÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.			

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.2,0X90MM	
	5861420-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.2,0X130MM	
	5861420-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.2,0X190MM	
	5861420-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.2,0X240MM	
	5861420-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.2,0X300MM	
	5861425-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.2,5X90MM	
	5861425-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.2,5X130MM	
	5861425-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.2,5X190MM	
	5861425-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.2,5X240MM	
	5861425-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.2,5X300MM	
	5861429-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.2,9X90MM	
	5861429-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.2,9X130MM	
	5861429-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.2,9X190MM	
	5861429-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.2,9X240MM	
	5861429-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.2,9X300MM	
	5861435-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.3,5X90MM	
	5861435-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.3,5X130MM	
	5861435-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.3,5X190MM	
	5861435-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.3,5X240MM	
	5861435-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO API SÃO INDICADAS PARA RECECÇÃO AGRESSIVA DE MENISCO, DESBRIDAMENTO ARTICULAR, E RESSECÇÃO ÓSSEA.			

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.2,0X90MM	
	5861420-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.2,0X130MM	
	5861420-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.2,0X190MM	
	5861420-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.2,0X240MM	
	5861420-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.2,0X300MM	
	5861425-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.2,5X90MM	
	5861425-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.2,5X130MM	
	5861425-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.2,5X190MM	
	5861425-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.2,5X240MM	
	5861425-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.2,5X300MM	
	5861429-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.2,9X90MM	
	5861429-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.2,9X130MM	
	5861429-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.2,9X190MM	
	5861429-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.2,9X240MM	
	5861429-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.2,9X300MM	
	5861435-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.3,5X90MM	
	5861435-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.3,5X130MM	
	5861435-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.3,5X190MM	
	5861435-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.3,5X240MM	
	5861435-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO APC SÃO INDICADAS PARA TODOS OS DESBRIDAMENTOS GERAIS DE TECIDOS MOLES, ESPECIALMENTE MENISCECTOMIA E CONDROPLASTIA.			

Imagem ilustrativa Engate	Código		Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.2,0X90MM		
	5861420-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.2,0X130MM		
	5861420-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.2,0X190MM		
	5861420-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.2,0X240MM		
	5861420-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.2,0X300MM		
	5861425-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.2,5X90MM		
	5861425-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.2,5X130MM		
	5861425-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.2,5X190MM		
	5861425-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.2,5X240MM		
	5861425-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.2,5X300MM		
	5861429-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.2,9X90MM		
	5861429-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.2,9X130MM		
	5861429-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.2,9X190MM		
	5861429-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.2,9X240MM		
	5861429-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.2,9X300MM		
	5861435-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.3,5X90MM		
	5861435-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.3,5X130MM		
	5861435-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.3,5X190MM		
	5861435-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.3,5X240MM		
	5861435-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.3,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO CM SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO DE MENISCO E DESBRIDAMENTO ARTICULAR				

Imagem ilustrativa Engate	Código		Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.2,0X90MM		
	5861420-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.2,0X130MM		
	5861420-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.2,0X190MM		
	5861420-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.2,0X240MM		
	5861420-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.2,0X300MM		
	5861425-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.2,5X90MM		
	5861425-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.2,5X130MM		
	5861425-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.2,5X190MM		
	5861425-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.2,5X240MM		
	5861425-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.2,5X300MM		
	5861429-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.2,9X90MM		
	5861429-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.2,9X130MM		
	5861429-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.2,9X190MM		
	5861429-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.2,9X240MM		
	5861429-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.2,9X300MM		
	5861435-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.3,5X90MM		
	5861435-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.3,5X130MM		
	5861435-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.3,5X190MM		
	5861435-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.3,5X240MM		
	5861435-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.3,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.2,0X90MM	
	5861420-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.2,0X130MM	
	5861420-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.2,0X190MM	
	5861420-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.2,0X240MM	
	5861420-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.2,0X300MM	
	5861425-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.2,5X90MM	
	5861425-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.2,5X130MM	
	5861425-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.2,5X190MM	
	5861425-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.2,5X240MM	
	5861425-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.2,5X300MM	
	5861429-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.2,9X90MM	
	5861429-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.2,9X130MM	
	5861429-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.2,9X190MM	
	5861429-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.2,9X240MM	
	5861429-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.2,9X300MM	
	5861435-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.3,5X90MM	
	5861435-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.3,5X130MM	
	5861435-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.3,5X190MM	
	5861435-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.3,5X240MM	
	5861435-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.			

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.2,0X90MM	
	5861420-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.2,0X130MM	
	5861420-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.2,0X190MM	
	5861420-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.2,0X240MM	
	5861420-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.2,0X300MM	
	5861425-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.2,5X90MM	
	5861425-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.2,5X130MM	
	5861425-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.2,5X190MM	
	5861425-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.2,5X240MM	
	5861425-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.2,5X300MM	
	5861429-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.2,9X90MM	
	5861429-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.2,9X130MM	
	5861429-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.2,9X190MM	
	5861429-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.2,9X240MM	
	5861429-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.2,9X300MM	
	5861435-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.3,5X90MM	
	5861435-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.3,5X130MM	
	5861435-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.3,5X190MM	
	5861435-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.3,5X240MM	
	5861435-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.			

Imagem ilustrativa Engate	Código		Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.2,0X90MM		
	5861420-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.2,0X130MM		
	5861420-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.2,0X190MM		
	5861420-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.2,0X240MM		
	5861420-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.2,0X300MM		
	5861425-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.2,5X90MM		
	5861425-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.2,5X130MM		
	5861425-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.2,5X190MM		
	5861425-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.2,5X240MM		
	5861425-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.2,5X300MM		
	5861429-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.2,9X90MM		
	5861429-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.2,9X130MM		
	5861429-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.2,9X190MM		
	5861429-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.2,9X240MM		
	5861429-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.2,9X300MM		
	5861435-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.3,5X90MM		
	5861435-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.3,5X130MM		
	5861435-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.3,5X190MM		
	5861435-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.3,5X240MM		
	5861435-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.3,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.2,0X90MM	
	5861420-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.2,0X130MM	
	5861420-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.2,0X190MM	
	5861420-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.2,0X240MM	
	5861420-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.2,0X300MM	
	5861425-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.2,5X90MM	
	5861425-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.2,5X130MM	
	5861425-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.2,5X190MM	
	5861425-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.2,5X240MM	
	5861425-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.2,5X300MM	
	5861429-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.2,9X90MM	
	5861429-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.2,9X130MM	
	5861429-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.2,9X190MM	
	5861429-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.2,9X240MM	
	5861429-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.2,9X300MM	
	5861435-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.3,5X90MM	
	5861435-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.3,5X130MM	
	5861435-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.3,5X190MM	
	5861435-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.3,5X240MM	
	5861435-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.			

Imagem ilustrativa Engate	Código		Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.2,0X90MM		
	5861420-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.2,0X130MM		
	5861420-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.2,0X190MM		
	5861420-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.2,0X240MM		
	5861420-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.2,0X300MM		
	5861425-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.2,5X90MM		
	5861425-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.2,5X130MM		
	5861425-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.2,5X190MM		
	5861425-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.2,5X240MM		
	5861425-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.2,5X300MM		
	5861429-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.2,9X90MM		
	5861429-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.2,9X130MM		
	5861429-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.2,9X190MM		
	5861429-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.2,9X240MM		
	5861429-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.2,9X300MM		
	5861435-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.3,5X90MM		
	5861435-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.3,5X130MM		
	5861435-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.3,5X190MM		
	5861435-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.3,5X240MM		
	5861435-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.3,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.2,0X90MM	
	5861420-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.2,0X130MM	
	5861420-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.2,0X190MM	
	5861420-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.2,0X240MM	
	5861420-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.2,0X300MM	
	5861425-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.2,5X90MM	
	5861425-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.2,5X130MM	
	5861425-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.2,5X190MM	
	5861425-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.2,5X240MM	
	5861425-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.2,5X300MM	
	5861429-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.2,9X90MM	
	5861429-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.2,9X130MM	
	5861429-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.2,9X190MM	
	5861429-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.2,9X240MM	
	5861429-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.2,9X300MM	
	5861435-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.3,5X90MM	
	5861435-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.3,5X130MM	
	5861435-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.3,5X190MM	
	5861435-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.3,5X240MM	
	5861435-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS			

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.2,0X90MM	
	5861420-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.2,0X130MM	
	5861420-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.2,0X190MM	
	5861420-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.2,0X240MM	
	5861420-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.2,0X300MM	
	5861425-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.2,5X90MM	
	5861425-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.2,5X130MM	
	5861425-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.2,5X190MM	
	5861425-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.2,5X240MM	
	5861425-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.2,5X300MM	
	5861429-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.2,9X90MM	
	5861429-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.2,9X130MM	
	5861429-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.2,9X190MM	
	5861429-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.2,9X240MM	
	5861429-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.2,9X300MM	
	5861435-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.3,5X90MM	
	5861435-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.3,5X130MM	
	5861435-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.3,5X190MM	
	5861435-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.3,5X240MM	
	5861435-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.			

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.2,0X90MM	
	5861420-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.2,0X130MM	
	5861420-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.2,0X190MM	
	5861420-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.2,0X240MM	
	5861420-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.2,0X300MM	
	5861425-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.2,5X90MM	
	5861425-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.2,5X130MM	
	5861425-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.2,5X190MM	
	5861425-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.2,5X240MM	
	5861425-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.2,5X300MM	
	5861429-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.2,9X90MM	
	5861429-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.2,9X130MM	
	5861429-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.2,9X190MM	
	5861429-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.2,9X240MM	
	5861429-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.2,9X300MM	
	5861435-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.3,5X90MM	
	5861435-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.3,5X130MM	
	5861435-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.3,5X190MM	
	5861435-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.3,5X240MM	
	5861435-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.			

IDENTIFICAÇÃO DAS LEGENDAS	
CMA = Ponta de Corte de Menisco Agressivo	BO-12 = Ponta Broca Oval 12AF
INC = Ponta Corte Incisivo	BO-SP = Ponta Broca Oval sem Proteção
RPC = Ponta Ressector de Perfil Completo	BR-6 = Ponta Broca Esférica 6AF
API = Ponta Corte Completo Incisivo	BR-12 = Ponta Broca Esférica 12AF
APC = Ponta Agressiva de Perfil Completo	BR-SP = Ponta Broca Esférica sem Proteção
RPC II = Ressector de Perfil Completo II	BC = Ponta Broca Cônica
CM = Ponta de Corte de Menisco	BC-SP = Ponta Broca Cônica sem Proteção
BO-6 = Ponta Broca Oval 6AF	BA = Ponta Broca Afiada

INDICAÇÃO E FINALIDADE

As Lâminas de Shaver são indicadas para cirurgias artroscópicas para ressecção de tecidos moles, ressecção de ossos, e meniscectomia.

A finalidade das lâminas é ser utilizadas para perfuração, sinovectomia ou corte, raspagem intra-articular e uniformização de tecido ósseo e cartilaginoso.

CONTRAINDICAÇÕES

Não se aplica

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO/MECANISMO DE AÇÃO

As Lâminas de Shaver são compostas por duas cânulas: Cânula Guia (externa) e Cânula de Sucção e Corte (interna), posicionadas coaxialmente.

Cada cânula possui em sua extremidade partes poliméricas que servem de engate para conexão com a peça de mão (Shaver).

As Lâminas de Shaver são compatíveis com peças de mão (Shaver) da ConMed Linvatec, Smith&Nephew Dyonics, Razek e Stryker Fórmula. Desta forma, as lâminas devidamente conectadas, passam a desenvolver os movimentos de rotação para início de desempenho.

A cânula externa não apresenta movimento e a cânula interna apresenta movimento rotatório. Esse movimento rotatório promove a ação de corte desejada ao entrar em contato com o tecido.

As cânulas possuem uma abertura frontal com borda lisa, dentada ou outra geometria, permitindo diversos tipos de corte e a sucção dos tecidos através da parte canulada.

MODO DE USO DO PRODUTO

O produto é projetado para ser utilizado exclusivamente em procedimentos artroscópicos conduzidos por médicos especialistas neste tipo de intervenção.

Após a retirada da embalagem, o produto é conectado pelo seu engate traseiro a uma peça de mão compatível, e de escolha do médico especialista.

O cirurgião controla a direção e velocidade de rotação das lâminas, bem como a duração e intensidade do contato, de acordo com sua experiência, tipo de tecido e outros parâmetros para obter o efeito desejado.

Conforme a Resolução RE nº 2605, de 11/08/06, Lâmina de Shaver com diâmetro interno menor que 3mm são enquadrados como de uso único e são proibidos de serem reprocessados e devem ser descartadas após o uso.

As lâminas devem ser descartadas em locais apropriados, de forma a evitar a contaminação do meio ambiente e demais indivíduos. Recomenda-se a adoção dos regulamentos legais locais para descarte de produtos potencialmente contaminantes (RDC 222 de 2018 - Resíduo Hospitalar).

Produto Médico de Uso Único – Não Reutilizar.

COMPOSIÇÃO

O tubo das cânulas, uma externa e uma interna, são fabricados com Aço Inoxidável AISI 304, as pontas são fabricadas com Aço Inoxidável XM-16, e o engate traseiro é fabricado com polímeros termoplásticos (ABS/PC), e cumprem com as seguintes normas:

- NBR 13911 - Instrumental cirúrgico - Material metálico - Especificações para aços inoxidáveis conformados;
- ASTM F899 - *Standard Specification for Wrought Stainless Steels for Surgical Instruments*.

ESTERILIZAÇÃO

As Lâminas de Shaver são esterilizadas por Óxido de Etileno – ETO.

Validade: 5 anos da data de fabricação.

Produto de uso único – PROIBIDO REPROCESSAR.

NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS

Na ocorrência de qualquer evento adverso ou a necessidade de registrar queixa técnica, a SARTORI e a Anvisa devem ser notificadas por meio dos seguintes canais:

SARTORI: <https://sartori.ind.br>

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) através do telefone +55 (19) 3538-1910 ou pelo e-mail: info@sartori.ind.br

Sistema NOTIVISA (Anvisa): www.gov.br/anvisa

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em local seco e fresco, protegido do calor excessivo e da luz do sol direta.

Recomendamos estocar o produto em temperaturas entre 5°C a 40°C.

Mantenha o produto distante de objetos cortantes ou pontiagudos.

O produto não deve ser armazenado diretamente ao chão, recomendamos o uso de prateleiras com 20 cm de distância do piso. Evitar empilhar mais do que 10 caixas.

TRANSPORTE

O produto deve ser transportado e acondicionado sempre protegido contra todo tipo de umidade, sujeira e contato com substâncias inflamáveis, corrosivas, tóxicas ou explosivas.

O produto deve ser transportado em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação.

O produto deve ser transportado de forma que sua embalagem permaneça intacta até o momento do uso.

Evitar colocar peso sobre as caixas, deformando as embalagens.

MANUSEIO DO PRODUTO

As lâminas são fornecidas estéreis.

A embalagem deve ser aberta apenas no momento do uso, em ambiente cirúrgico e manipulada com luvas, evitando o contato com outros materiais.

Caso a embalagem esteja danificada ou violada, não utilizar o produto e efetuar descarte de acordo com as normas hospitalares.

O produto é de uso único e não deve ser reutilizado, devendo ser descartado após o uso.

ADVERTÊNCIAS

- Produto estéril.
- Conforme a Resolução RE nº 2605, de 11/08/06, Lâmina de Shaver com diâmetro interno menor que 3mm são enquadrados como de uso único e são proibidos de serem reprocessados e devem ser descartadas após o uso.
- Verificar a integridade da embalagem antes do uso. Não utilizar caso a embalagem esteja aberta, danificada ou violada, ou om prazo de validade vencido.
- O produto deve estar íntegro para sua utilização, portanto recomendamos a análise do produto e caso apresente qualquer tipo de alteração como marcas de esforço mecânico, torto ou qualquer alteração visível, o mesmo deve ser descartado imediatamente.
- Testar o produto antes da sua utilização no paciente. Em caso de som ou vibração excessiva, ou aquecimento, não utilize o produto.
- Utilizar somente com irrigação do local de uso e sucção para o adequado arrefecimento da lâmina e evitar o travamento por acúmulo de material extraído do interior da lâmina.
- A carga lateral excessiva não melhora o corte e pode originar um aumento do desgaste da lâmina e até mesmo o travamento durante o uso.
- Não aplique ou exerça força de alavanca nas lâminas.
- Em caso de vibração ou som excessivo, aquecimento e/ou travamento durante o uso, interrompa imediatamente o procedimento e troque o produto. A continuidade do uso do produto travado pode deixar resquícios de metal na cavidade.
- O produto só deve ser utilizado por médicos cirurgiões qualificados, que possuam o conhecimento e a experiência necessários para a devida utilização do produto, conhecimento de manuseio de produtos estéreis e, principalmente, da importância de se manter um ambiente totalmente estéril nas salas de cirurgia, onde o cuidado e precaução com cada detalhe são fundamentais para que não haja riscos de contaminação.

PRECAUÇÕES

- Antes de utilizar o produto, o cirurgião deve ler atentamente as instruções de uso que o auxiliarão no uso correto e seguro, além de proteger contra possíveis riscos. Alertamos que é necessário observar a correlação entre a versão da Instrução de Uso disponível no site, ou impressa, com a versão indicada no rótulo do produto.
- Teste primeiramente a lâmina fora do paciente, nos modos e velocidades de trabalho.
- Não permita que a lâmina entre em contato com outros instrumentos durante o uso.
- Evitar utilizar por mais de 1 minuto seguido para evitar o aquecimento excessivo da lâmina.
- Utilizar nas velocidades e direções indicados ou na menor velocidade possível para obter o efeito desejado, diminuindo a possibilidade de falhas.

- Não toque a área de movimento da lâmina com outros instrumentos, utensílios, tecidos e ou partes do corpo. Se isso ocorrer, poderá resultar em quebra, fratura ou dano da lâmina ou do equipamento e dano ao operador.

EFEITOS ADVERSOS

Não se aplica.

RECLAMAÇÃO E ATENDIMENTO AO CLIENTE

Todo cliente ou usuário desse dispositivo médico que tiver dúvidas ou queira maiores esclarecimentos sobre os serviços e/ou produtos oferecidos, poderá entrar em contato com a Sartori Instrumentos, Implantes e Fixadores através dos dados para contato contido nas instruções de uso (disponível no site: www.sartori.ind.br/instrucao_uso) e rótulos da embalagem do produto.

Para o envio dos instrumentais ao fabricante para análise, o produto deve estar limpo e estéril. Devem ser utilizadas embalagens que mantenham a integridade física do mesmo. A embalagem deve conter todas as informações necessárias para a identificação do produto, bem como as condições de manuseio, tais como métodos de limpeza e desinfecção utilizados, bem como descrição e número do lote.

FABRICANTE/DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA.

Avenida Brasil, n.º 13500 - Distrito de Ajapi - Rio Claro - SP

CEP: 13508-500 Tel.: (19) 3538-1910

CNPJ: 04.861.623/0001-00 Indústria Brasileira

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: (19) 3538-1910

e-mail: info@sartori.ind.br

Registro ANVISA nº: 80083650079

Responsável Técnico: Sérgio R.A.de Oliveira

CREA/SP: 5070105936