



# Prótese Parcial para cabeça de RÁDIO

Catálogo de Produtos

Sartori Implantes

**ÍNDICE**

# Prótese Parcial para cabeça de RÁDIO


## ENTRE EM CONTATO

Fone +55 19 3538.1910  
[www.sartori.ind.br](http://www.sartori.ind.br)  
[comercial@sartori.ind.br](mailto:comercial@sartori.ind.br)

Estrada Municipal | RCL 10. Km 9 | nº13500  
Distrito de Ajapi | Rio Claro-SP | Cep: 13508-500

## PRÓTESE PARCIAL PARA CABEÇA DE RÁDIO

A Prótese Parcial para Cabeça de Rádio é um componente radial não modular monocomponente metálico. Sua extremidade é chanfrada para facilitar a inserção no canal medular. A cabeça da prótese é altamente polida para permitir um melhor desempenho da articulação. Este produto é destinado à artroplastia parcial da articulação, primária ou de revisão, desenvolvido para ser fixado ao canal medular radial através de cimento ósseo.

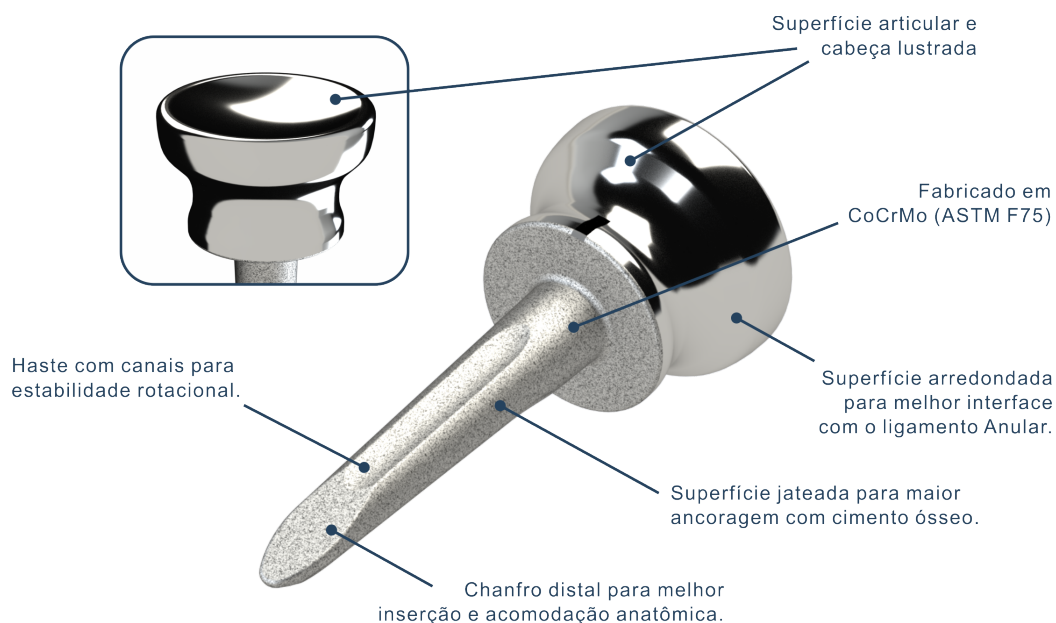

### INDICAÇÃO E FINALIDADE

A Prótese Parcial para Cabeça de Rádio está indicada nos casos de fratura cominutiva da cabeça do rádio associada:

- Instabilidade do cotovelo;
- Ruptura do ligamento colateral medial;
- Lesão do ligamento colateral lateral ulnar;
- Monteggia equivalente com fratura do olécrano e rádio;
- Fratura extensa do coronóide
- Lesão de Essex-Lopresti (lesão da membrana interóssea rádio-ulnar e articulação rádio-ulnar distal).


### CONTRAINDICAÇÕES

A seguir são listadas as contraindicações para a utilização dos implantes, ficando a cargo do cirurgião responsável, após um estudo minucioso do caso, a indicação do procedimento cirúrgico:

- Infecção ativa;
- Condição clínica pré-operatória desfavorável;
- Lesões neurológicas graves;
- Pacientes com sensibilidade a corpos estranhos, sendo que nestes casos testes deverão ser realizados;
- Pacientes que não querem ou estão impossibilitados de seguir as instruções pós-operatórias devido às condições que apresentam (mental ou física);

- Pacientes que fazem uso de substâncias entorpecentes, alcoólicas ou fumo;
- Pacientes com doença degenerativa avançada (por ex. osteoporose) e/ou outras afecções ósseas que possam comprometer a estabilidade da fixação e a vida útil do implante;
- Pacientes com estado geral comprometido e/ou imunodeprimidos impossibilitados de se submeter a um procedimento cirúrgico;
- Desordens metabólicas ou sistêmicas, ou tratamentos médicos que levam à deterioração progressiva dos ossos (terapias com corticóides).

## ESPECIFICAÇÕES

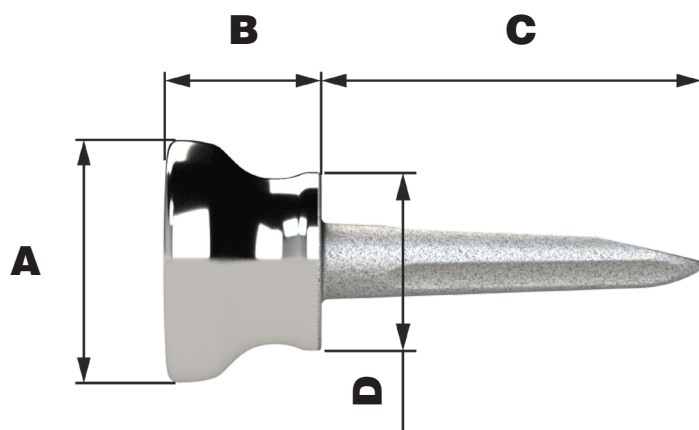


### PRÓTESE PARCIAL PARA CABEÇA DE RÁDIO

CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	A DIÂMETRO DA CABEÇA	B ALTURA DA CABEÇA	C COMPRIMENTO DA HASTE	D DIÂMETRO DE APOIO
0323019-009	PRÓT. PARCIAL P/ CABEÇA DE RÁDIO	19	9,0 mm	30,0 mm	14,0 mm
0323019-012	PRÓT. PARCIAL P/ CABEÇA DE RÁDIO	19	12,0 mm	30,0 mm	14,0 mm
0323019-015	PRÓT. PARCIAL P/ CABEÇA DE RÁDIO	19	15,0 mm	30,0 mm	14,0 mm
0323019-018	PRÓT. PARCIAL P/ CABEÇA DE RÁDIO	19	18,0 mm	30,0 mm	14,0 mm
0323019-021	PRÓT. PARCIAL P/ CABEÇA DE RÁDIO	19	21,0 mm	30,0 mm	14,0 mm



### RELAÇÃO INSTRUMENTAIS

CÓDIGO	NOME DO PRODUTO
T20 3 409	APOIO 09,0 RÁDIO
T20 3 412	APOIO 12,0 RÁDIO
T20 3 415	APOIO 15,0 RÁDIO
T20 3 418	APOIO 18,0 RÁDIO
T20 3 421	APOIO 21,0 RÁDIO
E00 0 348	ESTOJO S188
T25 0 430	FRESA COM STOP 4RÁDIO
T56 0 681	GUIA P/PRÓTESE DE CABEÇA DE RÁDIO
T28 0 410	IMPACTOR DE CABEÇA RÁDIO
R37 0 310	RASPA FINAL - RÁDIO MB
R37 0 300	RASPA INICIAL - RÁDIO MB

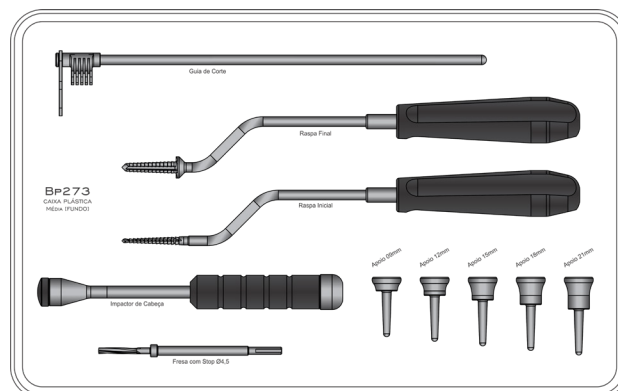



### Prótese parcial para cabeça de Rádio.

*Partial prosthesis for Radial head.*

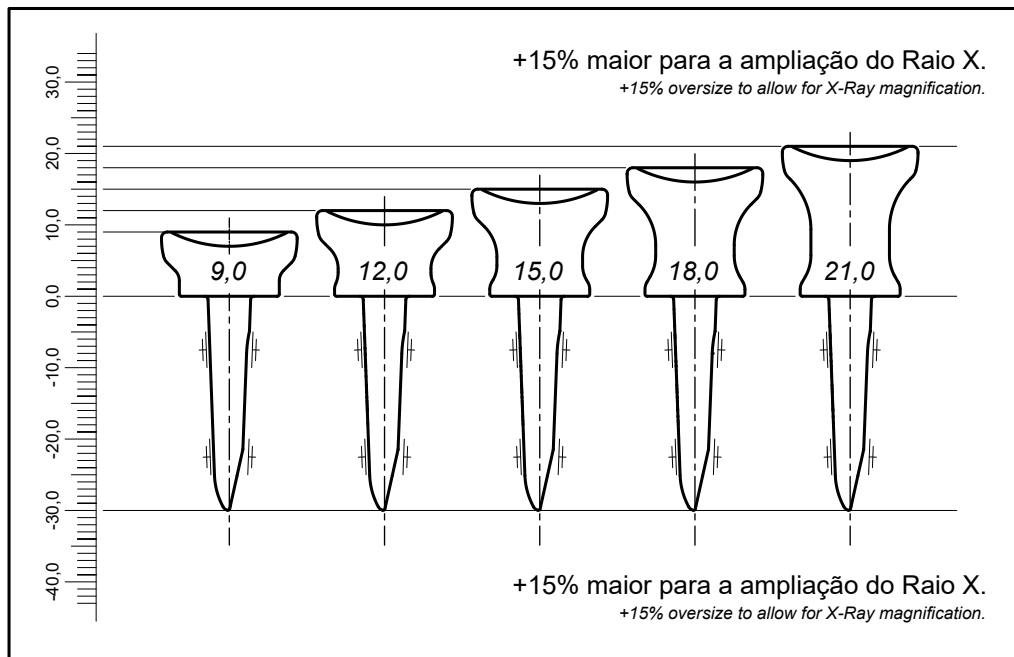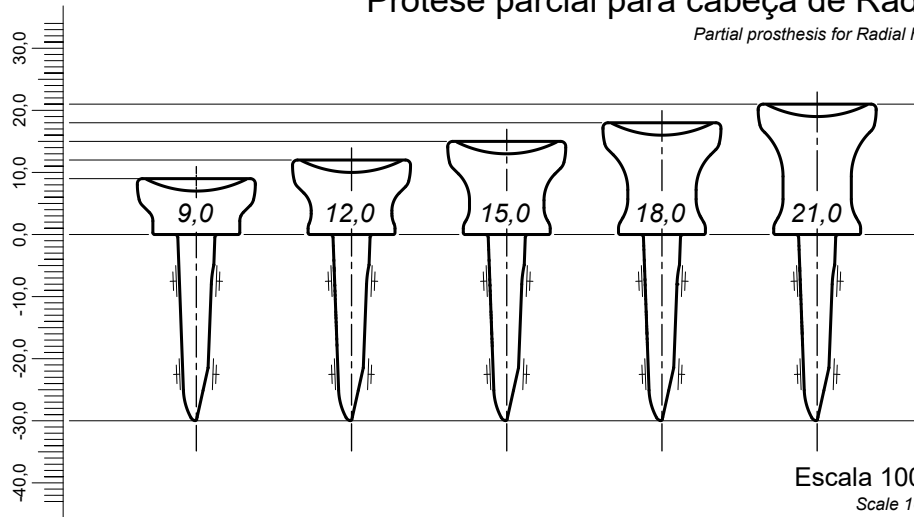

Indicador graduado do manto de cimento 0,5-1,0mm.

*Graduated marker indicating cement mantle 0,5-1,0mm.*

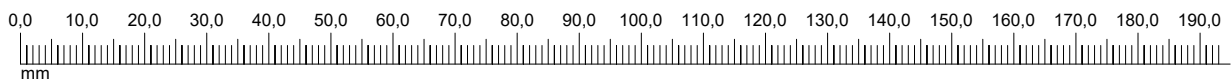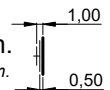



Estrada Municipal RCL 10. Km 9 | nº135000  
Distrito de Ajapi | Rio Claro-SP | Cep:13508-500

+55 19 3538 1910

[comercial@sartori.ind.br](mailto:comercial@sartori.ind.br)

[www.sartori.ind.br](http://www.sartori.ind.br)