

Luiz Guilherme Sartori & Cia Ltda. – EPP

CNPJ: 04.861.623/0001-00

Estr. Municipal RCL-010 nº. 13500, Km 9 – Ajapi - Rio Claro/SP - Resp. Téc.: Charles Eduardo Ceccato CREA/SP: 5062635520

Visando a praticidade e a facilidade de ter acesso às informações contidas nas Instruções de Uso de nossos produtos, a Sartori Instrumentos, Implantes e Fixadores em acordo com a IN nº 4/2012 estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os documentos para download no site: http://www.sartori.ind.br/instrucao_uso

Importante: Verifique a versão da Instrução de Uso indicado no rótulo do produto, juntamente com o nº do registro e clique em "Baixar" no documento desejado para iniciar a transferência do arquivo.

Para obter a Instrução de Uso impressa sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone +55 (19) 3538-1910 ou pelo e-mail info@sartori.ind.br.

INSTRUÇÃO DE USO

LÂMINAS DE SHAVER

Registro ANVISA nº 80083650079 - Revisão 01

Características e especificações técnicas do produto

Nome Técnico: Instrumentos Cirúrgicos

Nome Comercial: Lâminas de Shaver

Matéria Prima: Aço Inox / ABS/PC

Produto Estéril

Método de Esterilização: Óxido de Etileno - ETO

Validade: 5 anos da data de fabricação

Forma de Apresentação do Produto

Os modelos comerciais que compõem a família das Lâminas de Shaver são disponibilizados para comercialização embalados unitariamente e esterilizados por Óxido de Etileno - ETO.

Os produtos são embalados em embalagem **única** tipo Blister (embalagem primária), e acondicionados em embalagem externa de papel duro (embalagem secundária).

Na superfície da embalagem secundária contém rótulo com informações que identificam o produto, como código, descrição, número de lote, número do registro do produto na ANVISA, etc.

Na superfície da embalagem também apresenta as seguintes informações: Instrução de Uso disponível em http://www.sartori.ind.br/instrucao_uso. Reg. ANVISA: 800836500XX - Revisão: XX. Para obter a versão impressa, contatar: Fone: +55 19 3538-1910 - info@sartori.ind.br. Informações que estão em

conformidade com a Instrução Normativa nº 4 de 15 de junho de 2012, que estabelece regras para disponibilização de Instruções de Uso em formato não impresso de produtos para saúde.

A seguir imagem ilustrativa da Lâminas de Shaver:



Na tabela comparativa abaixo constam informações como o tipo de engate, tipo da ponta e a indicação de uso de cada um dos modelos comerciais que compõem a família das Lâminas de Shaver:






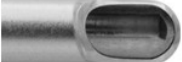




Imagem ilustr. Engate	Código	Descrição	Imagem ilustr. Ponta
	5861120-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.2,0X90MM	
	5861120-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.2,0X130MM	
	5861120-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.2,0X190MM	
	5861120-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.2,0X240MM	
	5861120-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.2,0X300MM	
	5861125-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.2,5X90MM	
	5861125-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.2,5X130MM	
	5861125-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.2,5X190MM	
	5861125-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.2,5X240MM	
	5861125-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.2,5X300MM	
	5861129-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.2,9X90MM	
	5861129-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.2,9X130MM	
	5861129-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.2,9X190MM	
	5861129-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.2,9X240MM	
	5861129-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.2,9X300MM	
	5861135-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.3,5X90MM	
	5861135-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.3,5X130MM	
	5861135-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.3,5X190MM	
	5861135-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.3,5X240MM	
	5861135-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO CMA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM			
Imagem ilustr. Engate	Código	Descrição	Imagem ilustr. Ponta
	5861120-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.2,0X90MM	
	5861120-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.2,0X130MM	
	5861120-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.2,0X190MM	
	5861120-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.2,0X240MM	
	5861120-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.2,0X300MM	
	5861125-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.2,5X90MM	
	5861125-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.2,5X130MM	
	5861125-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.2,5X190MM	
	5861125-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.2,5X240MM	
	5861125-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.2,5X300MM	
	5861129-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.2,9X90MM	
	5861129-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.2,9X130MM	
	5861129-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.2,9X190MM	
	5861129-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.2,9X240MM	
	5861129-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.2,9X300MM	
	5861135-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.3,5X90MM	
	5861135-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.3,5X130MM	
	5861135-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.3,5X190MM	
	5861135-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.3,5X240MM	
	5861135-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.3,5X300MM	
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO INC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM			

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861120-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.2,0X90MM	
	5861120-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.2,0X130MM	
	5861120-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.2,0X190MM	
	5861120-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.2,0X240MM	
	5861120-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.2,0X300MM	
	5861125-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.2,5X90MM	
	5861125-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.2,5X130MM	
	5861125-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.2,5X190MM	
	5861125-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.2,5X240MM	
	5861125-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.2,5X300MM	
	5861129-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.2,9X90MM	
	5861129-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.2,9X130MM	
	5861129-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.2,9X190MM	
	5861129-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.2,9X240MM	
	5861129-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.2,9X300MM	
	5861135-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.3,5X90MM	
	5861135-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.3,5X130MM	
	5861135-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.3,5X190MM	
	5861135-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.3,5X240MM	
5861135-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.3,5X300MM		



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECÇÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861120-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.2,0X90MM	
	5861120-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.2,0X130MM	
	5861120-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.2,0X190MM	
	5861120-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.2,0X240MM	
	5861120-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.2,0X300MM	
	5861125-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.2,5X90MM	
	5861125-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.2,5X130MM	
	5861125-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.2,5X190MM	
	5861125-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.2,5X240MM	
	5861125-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.2,5X300MM	
	5861129-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.2,9X90MM	
	5861129-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.2,9X130MM	
	5861129-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.2,9X190MM	
	5861129-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.2,9X240MM	
	5861129-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.2,9X300MM	
	5861135-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.3,5X90MM	
	5861135-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.3,5X130MM	
	5861135-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.3,5X190MM	
	5861135-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.3,5X240MM	
5861135-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.3,5X300MM		



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC II SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECÇÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861120-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.2,0X90MM	
	5861120-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.2,0X130MM	
	5861120-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.2,0X190MM	
	5861120-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.2,0X240MM	
	5861120-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.2,0X300MM	
	5861125-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.2,5X90MM	
	5861125-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.2,5X130MM	
	5861125-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.2,5X190MM	
	5861125-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.2,5X240MM	
	5861125-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.2,5X300MM	
	5861129-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.2,9X90MM	
	5861129-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.2,9X130MM	
	5861129-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.2,9X190MM	
	5861129-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.2,9X240MM	
	5861129-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.2,9X300MM	
	5861135-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.3,5X90MM	
	5861135-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.3,5X130MM	
	5861135-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.3,5X190MM	
	5861135-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.3,5X240MM	
	5861135-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO API SÃO INDICADAS PARA RECECÇÃO AGRESSIVA DE MENISCO, DESBRIDAMENTO ARTICULAR, E RESSECÇÃO ÓSSEA.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861120-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.2,0X90MM	
	5861120-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.2,0X130MM	
	5861120-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.2,0X190MM	
	5861120-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.2,0X240MM	
	5861120-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.2,0X300MM	
	5861125-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.2,5X90MM	
	5861125-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.2,5X130MM	
	5861125-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.2,5X190MM	
	5861125-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.2,5X240MM	
	5861125-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.2,5X300MM	
	5861129-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.2,9X90MM	
	5861129-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.2,9X130MM	
	5861129-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.2,9X190MM	
	5861129-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.2,9X240MM	
	5861129-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.2,9X300MM	
	5861135-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.3,5X90MM	
	5861135-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.3,5X130MM	
	5861135-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.3,5X190MM	
	5861135-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.3,5X240MM	
	5861135-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO APC SÃO INDICADAS PARA TODOS OS DESBRIDAMENTOS GERAIS DE TECIDOS MOLES, ESPECIALMENTE MENISCECTOMIA E CONDROPLASTIA.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861120-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.2,0X90MM	
	5861120-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.2,0X130MM	
	5861120-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.2,0X190MM	
	5861120-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.2,0X240MM	
	5861120-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.2,0X300MM	
	5861125-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.2,5X90MM	
	5861125-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.2,5X130MM	
	5861125-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.2,5X190MM	
	5861125-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.2,5X240MM	
	5861125-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.2,5X300MM	
	5861129-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.2,9X90MM	
	5861129-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.2,9X130MM	
	5861129-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.2,9X190MM	
	5861129-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.2,9X240MM	
	5861129-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.2,9X300MM	
	5861135-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.3,5X90MM	
	5861135-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.3,5X130MM	
	5861135-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.3,5X190MM	
	5861135-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.3,5X240MM	
	5861135-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO CM SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO DE MENISCO E DESBRIDAMENTO ARTICULAR

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861120-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.2,0X90MM	
	5861120-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.2,0X130MM	
	5861120-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.2,0X190MM	
	5861120-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.2,0X240MM	
	5861120-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.2,0X300MM	
	5861125-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.2,5X90MM	
	5861125-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.2,5X130MM	
	5861125-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.2,5X190MM	
	5861125-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.2,5X240MM	
	5861125-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.2,5X300MM	
	5861129-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.2,9X90MM	
	5861129-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.2,9X130MM	
	5861129-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.2,9X190MM	
	5861129-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.2,9X240MM	
	5861129-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.2,9X300MM	
	5861135-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.3,5X90MM	
	5861135-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.3,5X130MM	
	5861135-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.3,5X190MM	
	5861135-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.3,5X240MM	
	5861135-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861120-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.2,0X90MM	
	5861120-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.2,0X130MM	
	5861120-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.2,0X190MM	
	5861120-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.2,0X240MM	
	5861120-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.2,0X300MM	
	5861125-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.2,5X90MM	
	5861125-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.2,5X130MM	
	5861125-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.2,5X190MM	
	5861125-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.2,5X240MM	
	5861125-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.2,5X300MM	
	5861129-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.2,9X90MM	
	5861129-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.2,9X130MM	
	5861129-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.2,9X190MM	
	5861129-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.2,9X240MM	
	5861129-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.2,9X300MM	
	5861135-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.3,5X90MM	
	5861135-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.3,5X130MM	
	5861135-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.3,5X190MM	
5861135-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.3,5X240MM		
5861135-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.3,5X300MM		



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861120-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.2,0X90MM	
	5861120-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.2,0X130MM	
	5861120-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.2,0X190MM	
	5861120-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.2,0X240MM	
	5861120-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.2,0X300MM	
	5861125-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.2,5X90MM	
	5861125-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.2,5X130MM	
	5861125-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.2,5X190MM	
	5861125-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.2,5X240MM	
	5861125-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.2,5X300MM	
	5861129-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.2,9X90MM	
	5861129-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.2,9X130MM	
	5861129-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.2,9X190MM	
	5861129-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.2,9X240MM	
	5861129-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.2,9X300MM	
	5861135-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.3,5X90MM	
	5861135-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.3,5X130MM	
	5861135-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.3,5X190MM	
5861135-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.3,5X240MM		
5861135-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.3,5X300MM		



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861120-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.2,0X90MM	
	5861120-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.2,0X130MM	
	5861120-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.2,0X190MM	
	5861120-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.2,0X240MM	
	5861120-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.2,0X300MM	
	5861125-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.2,5X90MM	
	5861125-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.2,5X130MM	
	5861125-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.2,5X190MM	
	5861125-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.2,5X240MM	
	5861125-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.2,5X300MM	
	5861129-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.2,9X90MM	
	5861129-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.2,9X130MM	
	5861129-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.2,9X190MM	
	5861129-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.2,9X240MM	
	5861129-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.2,9X300MM	
	5861135-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.3,5X90MM	
	5861135-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.3,5X130MM	
	5861135-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.3,5X190MM	
5861135-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.3,5X240MM		
5861135-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.3,5X300MM		



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861120-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.2,0X90MM	
	5861120-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.2,0X130MM	
	5861120-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.2,0X190MM	
	5861120-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.2,0X240MM	
	5861120-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.2,0X300MM	
	5861125-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.2,5X90MM	
	5861125-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.2,5X130MM	
	5861125-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.2,5X190MM	
	5861125-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.2,5X240MM	
	5861125-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.2,5X300MM	
	5861129-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.2,9X90MM	
	5861129-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.2,9X130MM	
	5861129-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.2,9X190MM	
	5861129-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.2,9X240MM	
	5861129-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.2,9X300MM	
	5861135-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.3,5X90MM	
	5861135-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.3,5X130MM	
	5861135-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.3,5X190MM	
5861135-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.3,5X240MM		
5861135-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.3,5X300MM		



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861120-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.2,0X90MM	
	5861120-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.2,0X130MM	
	5861120-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.2,0X190MM	
	5861120-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.2,0X240MM	
	5861120-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.2,0X300MM	
	5861125-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.2,5X90MM	
	5861125-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.2,5X130MM	
	5861125-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.2,5X190MM	
	5861125-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.2,5X240MM	
	5861125-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.2,5X300MM	
	5861129-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.2,9X90MM	
	5861129-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.2,9X130MM	
	5861129-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.2,9X190MM	
	5861129-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.2,9X240MM	
	5861129-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.2,9X300MM	
	5861135-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.3,5X90MM	
	5861135-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.3,5X130MM	
	5861135-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.3,5X190MM	
	5861135-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.3,5X240MM	
	5861135-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861120-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.2,0X90MM	
	5861120-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.2,0X130MM	
	5861120-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.2,0X190MM	
	5861120-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.2,0X240MM	
	5861120-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.2,0X300MM	
	5861125-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.2,5X90MM	
	5861125-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.2,5X130MM	
	5861125-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.2,5X190MM	
	5861125-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.2,5X240MM	
	5861125-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.2,5X300MM	
	5861129-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.2,9X90MM	
	5861129-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.2,9X130MM	
	5861129-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.2,9X190MM	
	5861129-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.2,9X240MM	
	5861129-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.2,9X300MM	
	5861135-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.3,5X90MM	
	5861135-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.3,5X130MM	
	5861135-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.3,5X190MM	
	5861135-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.3,5X240MM	
	5861135-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861120-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.2,0X90MM	
	5861120-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.2,0X130MM	
	5861120-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.2,0X190MM	
	5861120-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.2,0X240MM	
	5861120-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.2,0X300MM	
	5861125-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.2,5X90MM	
	5861125-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.2,5X130MM	
	5861125-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.2,5X190MM	
	5861125-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.2,5X240MM	
	5861125-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.2,5X300MM	
	5861129-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.2,9X90MM	
	5861129-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.2,9X130MM	
	5861129-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.2,9X190MM	
	5861129-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.2,9X240MM	
	5861129-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.2,9X300MM	
	5861135-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.3,5X90MM	
	5861135-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.3,5X130MM	
	5861135-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.3,5X190MM	
	5861135-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.3,5X240MM	
	5861135-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861120-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.2,0X90MM	
	5861120-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.2,0X130MM	
	5861120-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.2,0X190MM	
	5861120-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.2,0X240MM	
	5861120-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.2,0X300MM	
	5861125-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.2,5X90MM	
	5861125-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.2,5X130MM	
	5861125-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.2,5X190MM	
	5861125-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.2,5X240MM	
	5861125-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.2,5X300MM	
	5861129-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.2,9X90MM	
	5861129-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.2,9X130MM	
	5861129-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.2,9X190MM	
	5861129-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.2,9X240MM	
	5861129-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.2,9X300MM	
	5861135-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.3,5X90MM	
	5861135-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.3,5X130MM	
	5861135-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.3,5X190MM	
	5861135-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.3,5X240MM	
	5861135-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.2,0X90MM	
	5861220-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.2,0X130MM	
	5861220-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.2,0X190MM	
	5861220-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.2,0X240MM	
	5861220-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.2,0X300MM	
	5861225-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.2,5X90MM	
	5861225-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.2,5X130MM	
	5861225-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.2,5X190MM	
	5861225-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.2,5X240MM	
	5861225-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.2,5X300MM	
	5861229-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.2,9X90MM	
	5861229-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.2,9X130MM	
	5861229-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.2,9X190MM	
	5861229-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.2,9X240MM	
	5861229-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.2,9X300MM	
	5861235-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.3,5X90MM	
	5861235-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.3,5X130MM	
	5861235-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.3,5X190MM	
	5861235-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.3,5X240MM	
	5861235-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO CMA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.2,0X90MM	
	5861220-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.2,0X130MM	
	5861220-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.2,0X190MM	
	5861220-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.2,0X240MM	
	5861220-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.2,0X300MM	
	5861225-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.2,5X90MM	
	5861225-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.2,5X130MM	
	5861225-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.2,5X190MM	
	5861225-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.2,5X240MM	
	5861225-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.2,5X300MM	
	5861229-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.2,9X90MM	
	5861229-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.2,9X130MM	
	5861229-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.2,9X190MM	
	5861229-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.2,9X240MM	
	5861229-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.2,9X300MM	
	5861235-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.3,5X90MM	
	5861235-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.3,5X130MM	
	5861235-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.3,5X190MM	
	5861235-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.3,5X240MM	
	5861235-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO INC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.2,0X90MM	
	5861220-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.2,0X130MM	
	5861220-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.2,0X190MM	
	5861220-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.2,0X240MM	
	5861220-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.2,0X300MM	
	5861225-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.2,5X90MM	
	5861225-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.2,5X130MM	
	5861225-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.2,5X190MM	
	5861225-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.2,5X240MM	
	5861225-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.2,5X300MM	
	5861229-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.2,9X90MM	
	5861229-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.2,9X130MM	
	5861229-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.2,9X190MM	
	5861229-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.2,9X240MM	
	5861229-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.2,9X300MM	
	5861235-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.3,5X90MM	
	5861235-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.3,5X130MM	
	5861235-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.3,5X190MM	
5861235-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.3,5X240MM		
5861235-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.3,5X300MM		



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECÇÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.2,0X90MM	
	5861220-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.2,0X130MM	
	5861220-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.2,0X190MM	
	5861220-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.2,0X240MM	
	5861220-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.2,0X300MM	
	5861225-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.2,5X90MM	
	5861225-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.2,5X130MM	
	5861225-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.2,5X190MM	
	5861225-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.2,5X240MM	
	5861225-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.2,5X300MM	
	5861229-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.2,9X90MM	
	5861229-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.2,9X130MM	
	5861229-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.2,9X190MM	
	5861229-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.2,9X240MM	
	5861229-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.2,9X300MM	
	5861235-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.3,5X90MM	
	5861235-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.3,5X130MM	
	5861235-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.3,5X190MM	
5861235-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.3,5X240MM		
5861235-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.3,5X300MM		



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC II SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECÇÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.2,0X90MM	
	5861220-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.2,0X130MM	
	5861220-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.2,0X190MM	
	5861220-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.2,0X240MM	
	5861220-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.2,0X300MM	
	5861225-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.2,5X90MM	
	5861225-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.2,5X130MM	
	5861225-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.2,5X190MM	
	5861225-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.2,5X240MM	
	5861225-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.2,5X300MM	
	5861229-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.2,9X90MM	
	5861229-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.2,9X130MM	
	5861229-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.2,9X190MM	
	5861229-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.2,9X240MM	
	5861229-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.2,9X300MM	
	5861235-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.3,5X90MM	
	5861235-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.3,5X130MM	
	5861235-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.3,5X190MM	
	5861235-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.3,5X240MM	
	5861235-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.3,5X300MM	



LÂMINAS COM PONTAS TIPO API SÃO INDICADAS PARA RECECÇÃO AGRESSIVA DE MENISCO, DESBRIDAMENTO ARTICULAR, E RESSECÇÃO ÓSSEA.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.2,0X90MM	
	5861220-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.2,0X130MM	
	5861220-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.2,0X190MM	
	5861220-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.2,0X240MM	
	5861220-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.2,0X300MM	
	5861225-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.2,5X90MM	
	5861225-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.2,5X130MM	
	5861225-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.2,5X190MM	
	5861225-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.2,5X240MM	
	5861225-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.2,5X300MM	
	5861229-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.2,9X90MM	
	5861229-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.2,9X130MM	
	5861229-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.2,9X190MM	
	5861229-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.2,9X240MM	
	5861229-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.2,9X300MM	
	5861235-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.3,5X90MM	
	5861235-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.3,5X130MM	
	5861235-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.3,5X190MM	
	5861235-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.3,5X240MM	
	5861235-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO APC SÃO INDICADAS PARA TODOS OS DESBRIDAMENTOS GERAIS DE TECIDOS MOLES, ESPECIALMENTE MENISCECTOMIA E CONDROPLASTIA.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.2,0X90MM	
	5861220-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.2,0X130MM	
	5861220-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.2,0X190MM	
	5861220-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.2,0X240MM	
	5861220-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.2,0X300MM	
	5861225-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.2,5X90MM	
	5861225-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.2,5X130MM	
	5861225-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.2,5X190MM	
	5861225-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.2,5X240MM	
	5861225-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.2,5X300MM	
	5861229-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.2,9X90MM	
	5861229-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.2,9X130MM	
	5861229-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.2,9X190MM	
	5861229-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.2,9X240MM	
	5861229-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.2,9X300MM	
	5861235-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.3,5X90MM	
	5861235-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.3,5X130MM	
	5861235-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.3,5X190MM	
	5861235-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.3,5X240MM	
	5861235-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO CM SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO DE MENISCO E DESBRIDAMENTO ARTICULAR

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.2,0X90MM	
	5861220-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.2,0X130MM	
	5861220-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.2,0X190MM	
	5861220-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.2,0X240MM	
	5861220-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.2,0X300MM	
	5861225-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.2,5X90MM	
	5861225-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.2,5X130MM	
	5861225-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.2,5X190MM	
	5861225-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.2,5X240MM	
	5861225-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.2,5X300MM	
	5861229-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.2,9X90MM	
	5861229-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.2,9X130MM	
	5861229-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.2,9X190MM	
	5861229-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.2,9X240MM	
	5861229-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.2,9X300MM	
	5861235-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.3,5X90MM	
	5861235-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.3,5X130MM	
	5861235-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.3,5X190MM	
	5861235-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.3,5X240MM	
	5861235-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.2,0X90MM	
	5861220-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.2,0X130MM	
	5861220-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.2,0X190MM	
	5861220-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.2,0X240MM	
	5861220-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.2,0X300MM	
	5861225-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.2,5X90MM	
	5861225-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.2,5X130MM	
	5861225-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.2,5X190MM	
	5861225-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.2,5X240MM	
	5861225-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.2,5X300MM	
	5861229-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.2,9X90MM	
	5861229-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.2,9X130MM	
	5861229-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.2,9X190MM	
	5861229-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.2,9X240MM	
	5861229-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.2,9X300MM	
	5861235-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.3,5X90MM	
	5861235-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.3,5X130MM	
	5861235-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.3,5X190MM	
	5861235-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.3,5X240MM	
	5861235-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.2,0X90MM	
	5861220-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.2,0X130MM	
	5861220-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.2,0X190MM	
	5861220-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.2,0X240MM	
	5861220-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.2,0X300MM	
	5861225-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.2,5X90MM	
	5861225-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.2,5X130MM	
	5861225-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.2,5X190MM	
	5861225-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.2,5X240MM	
	5861225-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.2,5X300MM	
	5861229-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.2,9X90MM	
	5861229-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.2,9X130MM	
	5861229-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.2,9X190MM	
	5861229-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.2,9X240MM	
	5861229-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.2,9X300MM	
	5861235-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.3,5X90MM	
	5861235-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.3,5X130MM	
	5861235-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.3,5X190MM	
	5861235-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.3,5X240MM	
	5861235-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.2,0X90MM	
	5861220-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.2,0X130MM	
	5861220-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.2,0X190MM	
	5861220-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.2,0X240MM	
	5861220-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.2,0X300MM	
	5861225-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.2,5X90MM	
	5861225-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.2,5X130MM	
	5861225-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.2,5X190MM	
	5861225-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.2,5X240MM	
	5861225-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.2,5X300MM	
	5861229-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.2,9X90MM	
	5861229-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.2,9X130MM	
	5861229-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.2,9X190MM	
	5861229-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.2,9X240MM	
	5861229-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.2,9X300MM	
	5861235-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.3,5X90MM	
	5861235-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.3,5X130MM	
	5861235-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.3,5X190MM	
	5861235-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.3,5X240MM	
	5861235-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.2,0X90MM	
	5861220-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.2,0X130MM	
	5861220-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.2,0X190MM	
	5861220-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.2,0X240MM	
	5861220-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.2,0X300MM	
	5861225-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.2,5X90MM	
	5861225-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.2,5X130MM	
	5861225-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.2,5X190MM	
	5861225-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.2,5X240MM	
	5861225-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.2,5X300MM	
	5861229-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.2,9X90MM	
	5861229-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.2,9X130MM	
	5861229-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.2,9X190MM	
	5861229-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.2,9X240MM	
	5861229-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.2,9X300MM	
	5861235-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.3,5X90MM	
	5861235-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.3,5X130MM	
	5861235-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.3,5X190MM	
	5861235-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.3,5X240MM	
	5861235-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.2,0X90MM	
	5861220-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.2,0X130MM	
	5861220-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.2,0X190MM	
	5861220-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.2,0X240MM	
	5861220-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.2,0X300MM	
	5861225-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.2,5X90MM	
	5861225-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.2,5X130MM	
	5861225-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.2,5X190MM	
	5861225-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.2,5X240MM	
	5861225-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.2,5X300MM	
	5861229-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.2,9X90MM	
	5861229-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.2,9X130MM	
	5861229-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.2,9X190MM	
	5861229-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.2,9X240MM	
	5861229-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.2,9X300MM	
	5861235-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.3,5X90MM	
	5861235-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.3,5X130MM	
	5861235-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.3,5X190MM	
	5861235-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.3,5X240MM	
	5861235-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.2,0X90MM	
	5861220-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.2,0X130MM	
	5861220-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.2,0X190MM	
	5861220-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.2,0X240MM	
	5861220-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.2,0X300MM	
	5861225-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.2,5X90MM	
	5861225-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.2,5X130MM	
	5861225-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.2,5X190MM	
	5861225-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.2,5X240MM	
	5861225-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.2,5X300MM	
	5861229-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.2,9X90MM	
	5861229-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.2,9X130MM	
	5861229-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.2,9X190MM	
	5861229-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.2,9X240MM	
	5861229-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.2,9X300MM	
	5861235-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.3,5X90MM	
	5861235-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.3,5X130MM	
	5861235-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.3,5X190MM	
	5861235-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.3,5X240MM	
	5861235-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.2,0X90MM	
	5861220-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.2,0X130MM	
	5861220-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.2,0X190MM	
	5861220-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.2,0X240MM	
	5861220-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.2,0X300MM	
	5861225-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.2,5X90MM	
	5861225-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.2,5X130MM	
	5861225-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.2,5X190MM	
	5861225-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.2,5X240MM	
	5861225-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.2,5X300MM	
	5861229-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.2,9X90MM	
	5861229-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.2,9X130MM	
	5861229-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.2,9X190MM	
	5861229-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.2,9X240MM	
	5861229-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.2,9X300MM	
	5861235-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.3,5X90MM	
	5861235-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.3,5X130MM	
	5861235-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.3,5X190MM	
5861235-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.3,5X240MM		
5861235-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.3,5X300MM		



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861220-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.2,0X90MM	
	5861220-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.2,0X130MM	
	5861220-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.2,0X190MM	
	5861220-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.2,0X240MM	
	5861220-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.2,0X300MM	
	5861225-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.2,5X90MM	
	5861225-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.2,5X130MM	
	5861225-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.2,5X190MM	
	5861225-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.2,5X240MM	
	5861225-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.2,5X300MM	
	5861229-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.2,9X90MM	
	5861229-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.2,9X130MM	
	5861229-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.2,9X190MM	
	5861229-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.2,9X240MM	
	5861229-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.2,9X300MM	
	5861235-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.3,5X90MM	
	5861235-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.3,5X130MM	
	5861235-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.3,5X190MM	
5861235-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.3,5X240MM		
5861235-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.3,5X300MM		



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.2,0X90MM	
	5861320-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.2,0X130MM	
	5861320-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.2,0X190MM	
	5861320-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.2,0X240MM	
	5861320-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.2,0X300MM	
	5861325-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.2,5X90MM	
	5861325-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.2,5X130MM	
	5861325-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.2,5X190MM	
	5861325-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.2,5X240MM	
	5861325-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.2,5X300MM	
	5861329-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.2,9X90MM	
	5861329-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.2,9X130MM	
	5861329-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.2,9X190MM	
	5861329-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.2,9X240MM	
	5861329-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.2,9X300MM	
	5861335-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.3,5X90MM	
	5861335-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.3,5X130MM	
	5861335-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.3,5X190MM	
5861335-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.3,5X240MM		
5861335-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.3,5X300MM		


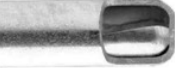
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO CMA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.2,0X90MM	
	5861320-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.2,0X130MM	
	5861320-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.2,0X190MM	
	5861320-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.2,0X240MM	
	5861320-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.2,0X300MM	
	5861325-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.2,5X90MM	
	5861325-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.2,5X130MM	
	5861325-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.2,5X190MM	
	5861325-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.2,5X240MM	
	5861325-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.2,5X300MM	
	5861329-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.2,9X90MM	
	5861329-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.2,9X130MM	
	5861329-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.2,9X190MM	
	5861329-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.2,9X240MM	
	5861329-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.2,9X300MM	
	5861335-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.3,5X90MM	
	5861335-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.3,5X130MM	
	5861335-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.3,5X190MM	
5861335-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.3,5X240MM		
5861335-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.3,5X300MM		



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO INC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.2,0X90MM	
	5861320-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.2,0X130MM	
	5861320-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.2,0X190MM	
	5861320-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.2,0X240MM	
	5861320-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.2,0X300MM	
	5861325-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.2,5X90MM	
	5861325-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.2,5X130MM	
	5861325-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.2,5X190MM	
	5861325-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.2,5X240MM	
	5861325-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.2,5X300MM	
	5861329-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.2,9X90MM	
	5861329-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.2,9X130MM	
	5861329-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.2,9X190MM	
	5861329-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.2,9X240MM	
	5861329-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.2,9X300MM	
	5861335-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.3,5X90MM	
	5861335-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.3,5X130MM	
	5861335-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.3,5X190MM	
	5861335-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.3,5X240MM	
5861335-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.3,5X300MM		



LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECÇÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.2,0X90MM	
	5861320-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.2,0X130MM	
	5861320-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.2,0X190MM	
	5861320-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.2,0X240MM	
	5861320-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.2,0X300MM	
	5861325-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.2,5X90MM	
	5861325-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.2,5X130MM	
	5861325-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.2,5X190MM	
	5861325-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.2,5X240MM	
	5861325-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.2,5X300MM	
	5861329-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.2,9X90MM	
	5861329-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.2,9X130MM	
	5861329-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.2,9X190MM	
	5861329-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.2,9X240MM	
	5861329-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.2,9X300MM	
	5861335-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.3,5X90MM	
	5861335-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.3,5X130MM	
	5861335-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.3,5X190MM	
	5861335-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.3,5X240MM	
5861335-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.3,5X300MM		



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC II SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECÇÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.2,0X90MM	
	5861320-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.2,0X130MM	
	5861320-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.2,0X190MM	
	5861320-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.2,0X240MM	
	5861320-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.2,0X300MM	
	5861325-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.2,5X90MM	
	5861325-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.2,5X130MM	
	5861325-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.2,5X190MM	
	5861325-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.2,5X240MM	
	5861325-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.2,5X300MM	
	5861329-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.2,9X90MM	
	5861329-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.2,9X130MM	
	5861329-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.2,9X190MM	
	5861329-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.2,9X240MM	
	5861329-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.2,9X300MM	
	5861335-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.3,5X90MM	
	5861335-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.3,5X130MM	
	5861335-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.3,5X190MM	
	5861335-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.3,5X240MM	
	5861335-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO API SÃO INDICADAS PARA RECECÇÃO AGRESSIVA DE MENISCO, DESBRIDAMENTO ARTICULAR, E RESSECÇÃO ÓSSEA.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.2,0X90MM	
	5861320-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.2,0X130MM	
	5861320-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.2,0X190MM	
	5861320-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.2,0X240MM	
	5861320-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.2,0X300MM	
	5861325-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.2,5X90MM	
	5861325-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.2,5X130MM	
	5861325-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.2,5X190MM	
	5861325-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.2,5X240MM	
	5861325-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.2,5X300MM	
	5861329-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.2,9X90MM	
	5861329-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.2,9X130MM	
	5861329-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.2,9X190MM	
	5861329-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.2,9X240MM	
	5861329-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.2,9X300MM	
	5861335-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.3,5X90MM	
	5861335-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.3,5X130MM	
	5861335-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.3,5X190MM	
	5861335-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.3,5X240MM	
	5861335-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO APC SÃO INDICADAS PARA TODOS OS DESBRIDAMENTOS GERAIS DE TECIDOS MOLES, ESPECIALMENTE MENISCECTOMIA E CONDROPLASTIA.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.2,0X90MM	
	5861320-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.2,0X130MM	
	5861320-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.2,0X190MM	
	5861320-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.2,0X240MM	
	5861320-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.2,0X300MM	
	5861325-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.2,5X90MM	
	5861325-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.2,5X130MM	
	5861325-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.2,5X190MM	
	5861325-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.2,5X240MM	
	5861325-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.2,5X300MM	
	5861329-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.2,9X90MM	
	5861329-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.2,9X130MM	
	5861329-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.2,9X190MM	
	5861329-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.2,9X240MM	
	5861329-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.2,9X300MM	
	5861335-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.3,5X90MM	
	5861335-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.3,5X130MM	
	5861335-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.3,5X190MM	
	5861335-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.3,5X240MM	
	5861335-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.3,5X300MM	



LÂMINAS COM PONTAS TIPO CM SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO DE MENISCO E DESBRIDAMENTO ARTICULAR

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.2,0X90MM	
	5861320-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.2,0X130MM	
	5861320-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.2,0X190MM	
	5861320-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.2,0X240MM	
	5861320-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.2,0X300MM	
	5861325-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.2,5X90MM	
	5861325-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.2,5X130MM	
	5861325-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.2,5X190MM	
	5861325-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.2,5X240MM	
	5861325-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.2,5X300MM	
	5861329-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.2,9X90MM	
	5861329-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.2,9X130MM	
	5861329-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.2,9X190MM	
	5861329-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.2,9X240MM	
	5861329-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.2,9X300MM	
	5861335-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.3,5X90MM	
	5861335-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.3,5X130MM	
	5861335-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.3,5X190MM	
	5861335-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.3,5X240MM	
	5861335-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.2,0X90MM	
	5861320-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.2,0X130MM	
	5861320-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.2,0X190MM	
	5861320-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.2,0X240MM	
	5861320-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.2,0X300MM	
	5861325-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.2,5X90MM	
	5861325-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.2,5X130MM	
	5861325-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.2,5X190MM	
	5861325-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.2,5X240MM	
	5861325-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.2,5X300MM	
	5861329-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.2,9X90MM	
	5861329-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.2,9X130MM	
	5861329-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.2,9X190MM	
	5861329-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.2,9X240MM	
	5861329-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.2,9X300MM	
	5861335-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.3,5X90MM	
	5861335-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.3,5X130MM	
	5861335-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.3,5X190MM	
	5861335-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.3,5X240MM	
5861335-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.3,5X300MM		



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.2,0X90MM	
	5861320-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.2,0X130MM	
	5861320-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.2,0X190MM	
	5861320-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.2,0X240MM	
	5861320-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.2,0X300MM	
	5861325-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.2,5X90MM	
	5861325-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.2,5X130MM	
	5861325-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.2,5X190MM	
	5861325-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.2,5X240MM	
	5861325-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.2,5X300MM	
	5861329-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.2,9X90MM	
	5861329-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.2,9X130MM	
	5861329-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.2,9X190MM	
	5861329-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.2,9X240MM	
	5861329-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.2,9X300MM	
	5861335-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.3,5X90MM	
	5861335-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.3,5X130MM	
	5861335-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.3,5X190MM	
	5861335-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.3,5X240MM	
5861335-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.3,5X300MM		



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.2,0X90MM	
	5861320-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.2,0X130MM	
	5861320-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.2,0X190MM	
	5861320-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.2,0X240MM	
	5861320-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.2,0X300MM	
	5861325-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.2,5X90MM	
	5861325-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.2,5X130MM	
	5861325-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.2,5X190MM	
	5861325-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.2,5X240MM	
	5861325-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.2,5X300MM	
	5861329-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.2,9X90MM	
	5861329-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.2,9X130MM	
	5861329-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.2,9X190MM	
	5861329-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.2,9X240MM	
	5861329-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.2,9X300MM	
	5861335-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.3,5X90MM	
	5861335-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.3,5X130MM	
	5861335-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.3,5X190MM	
5861335-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.3,5X240MM		
5861335-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.3,5X300MM		



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.2,0X90MM	
	5861320-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.2,0X130MM	
	5861320-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.2,0X190MM	
	5861320-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.2,0X240MM	
	5861320-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.2,0X300MM	
	5861325-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.2,5X90MM	
	5861325-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.2,5X130MM	
	5861325-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.2,5X190MM	
	5861325-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.2,5X240MM	
	5861325-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.2,5X300MM	
	5861329-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.2,9X90MM	
	5861329-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.2,9X130MM	
	5861329-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.2,9X190MM	
	5861329-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.2,9X240MM	
	5861329-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.2,9X300MM	
	5861335-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.3,5X90MM	
	5861335-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.3,5X130MM	
	5861335-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.3,5X190MM	
5861335-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.3,5X240MM		
5861335-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.3,5X300MM		



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.2,0X90MM	
	5861320-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.2,0X130MM	
	5861320-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.2,0X190MM	
	5861320-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.2,0X240MM	
	5861320-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.2,0X300MM	
	5861325-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.2,5X90MM	
	5861325-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.2,5X130MM	
	5861325-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.2,5X190MM	
	5861325-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.2,5X240MM	
	5861325-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.2,5X300MM	
	5861329-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.2,9X90MM	
	5861329-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.2,9X130MM	
	5861329-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.2,9X190MM	
	5861329-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.2,9X240MM	
	5861329-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.2,9X300MM	
	5861335-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.3,5X90MM	
	5861335-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.3,5X130MM	
	5861335-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.3,5X190MM	
	5861335-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.3,5X240MM	
	5861335-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.2,0X90MM	
	5861320-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.2,0X130MM	
	5861320-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.2,0X190MM	
	5861320-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.2,0X240MM	
	5861320-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.2,0X300MM	
	5861325-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.2,5X90MM	
	5861325-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.2,5X130MM	
	5861325-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.2,5X190MM	
	5861325-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.2,5X240MM	
	5861325-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.2,5X300MM	
	5861329-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.2,9X90MM	
	5861329-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.2,9X130MM	
	5861329-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.2,9X190MM	
	5861329-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.2,9X240MM	
	5861329-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.2,9X300MM	
	5861335-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.3,5X90MM	
	5861335-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.3,5X130MM	
	5861335-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.3,5X190MM	
	5861335-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.3,5X240MM	
	5861335-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.2,0X90MM	
	5861320-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.2,0X130MM	
	5861320-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.2,0X190MM	
	5861320-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.2,0X240MM	
	5861320-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.2,0X300MM	
	5861325-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.2,5X90MM	
	5861325-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.2,5X130MM	
	5861325-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.2,5X190MM	
	5861325-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.2,5X240MM	
	5861325-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.2,5X300MM	
	5861329-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.2,9X90MM	
	5861329-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.2,9X130MM	
	5861329-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.2,9X190MM	
	5861329-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.2,9X240MM	
	5861329-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.2,9X300MM	
	5861335-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.3,5X90MM	
	5861335-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.3,5X130MM	
	5861335-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.3,5X190MM	
	5861335-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.3,5X240MM	
	5861335-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861320-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.2,0X90MM	
	5861320-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.2,0X130MM	
	5861320-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.2,0X190MM	
	5861320-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.2,0X240MM	
	5861320-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.2,0X300MM	
	5861325-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.2,5X90MM	
	5861325-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.2,5X130MM	
	5861325-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.2,5X190MM	
	5861325-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.2,5X240MM	
	5861325-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.2,5X300MM	
	5861329-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.2,9X90MM	
	5861329-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.2,9X130MM	
	5861329-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.2,9X190MM	
	5861329-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.2,9X240MM	
	5861329-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.2,9X300MM	
	5861335-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.3,5X90MM	
	5861335-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.3,5X130MM	
	5861335-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.3,5X190MM	
	5861335-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.3,5X240MM	
	5861335-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.2,0X90MM	
	5861420-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.2,0X130MM	
	5861420-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.2,0X190MM	
	5861420-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.2,0X240MM	
	5861420-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.2,0X300MM	
	5861425-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.2,5X90MM	
	5861425-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.2,5X130MM	
	5861425-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.2,5X190MM	
	5861425-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.2,5X240MM	
	5861425-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.2,5X300MM	
	5861429-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.2,9X90MM	
	5861429-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.2,9X130MM	
	5861429-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.2,9X190MM	
	5861429-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.2,9X240MM	
	5861429-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.2,9X300MM	
	5861435-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.3,5X90MM	
	5861435-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.3,5X130MM	
	5861435-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.3,5X190MM	
	5861435-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.3,5X240MM	
	5861435-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO CMA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.2,0X90MM	
	5861420-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.2,0X130MM	
	5861420-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.2,0X190MM	
	5861420-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.2,0X240MM	
	5861420-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.2,0X300MM	
	5861425-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.2,5X90MM	
	5861425-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.2,5X130MM	
	5861425-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.2,5X190MM	
	5861425-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.2,5X240MM	
	5861425-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.2,5X300MM	
	5861429-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.2,9X90MM	
	5861429-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.2,9X130MM	
	5861429-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.2,9X190MM	
	5861429-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.2,9X240MM	
	5861429-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.2,9X300MM	
	5861435-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.3,5X90MM	
	5861435-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.3,5X130MM	
	5861435-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.3,5X190MM	
	5861435-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.3,5X240MM	
	5861435-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO INC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.2,0X90MM	
	5861420-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.2,0X130MM	
	5861420-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.2,0X190MM	
	5861420-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.2,0X240MM	
	5861420-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.2,0X300MM	
	5861425-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.2,5X90MM	
	5861425-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.2,5X130MM	
	5861425-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.2,5X190MM	
	5861425-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.2,5X240MM	
	5861425-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.2,5X300MM	
	5861429-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.2,9X90MM	
	5861429-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.2,9X130MM	
	5861429-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.2,9X190MM	
	5861429-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.2,9X240MM	
	5861429-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.2,9X300MM	
	5861435-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.3,5X90MM	
	5861435-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.3,5X130MM	
	5861435-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.3,5X190MM	
	5861435-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.3,5X240MM	
	5861435-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECÇÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.2,0X90MM	
	5861420-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.2,0X130MM	
	5861420-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.2,0X190MM	
	5861420-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.2,0X240MM	
	5861420-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.2,0X300MM	
	5861425-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.2,5X90MM	
	5861425-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.2,5X130MM	
	5861425-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.2,5X190MM	
	5861425-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.2,5X240MM	
	5861425-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.2,5X300MM	
	5861429-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.2,9X90MM	
	5861429-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.2,9X130MM	
	5861429-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.2,9X190MM	
	5861429-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.2,9X240MM	
	5861429-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.2,9X300MM	
	5861435-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.3,5X90MM	
	5861435-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.3,5X130MM	
	5861435-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.3,5X190MM	
	5861435-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.3,5X240MM	
	5861435-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC II SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECÇÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.2,0X90MM	
	5861420-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.2,0X130MM	
	5861420-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.2,0X190MM	
	5861420-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.2,0X240MM	
	5861420-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.2,0X300MM	
	5861425-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.2,5X90MM	
	5861425-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.2,5X130MM	
	5861425-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.2,5X190MM	
	5861425-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.2,5X240MM	
	5861425-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.2,5X300MM	
	5861429-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.2,9X90MM	
	5861429-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.2,9X130MM	
	5861429-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.2,9X190MM	
	5861429-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.2,9X240MM	
	5861429-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.2,9X300MM	
	5861435-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.3,5X90MM	
	5861435-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.3,5X130MM	
	5861435-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.3,5X190MM	
	5861435-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.3,5X240MM	
	5861435-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO API SÃO INDICADAS PARA RECECÇÃO AGRESSIVA DE MENISCO, DESBRIDAMENTO ARTICULAR, E RESSECÇÃO ÓSSEA.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.2,0X90MM	
	5861420-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.2,0X130MM	
	5861420-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.2,0X190MM	
	5861420-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.2,0X240MM	
	5861420-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.2,0X300MM	
	5861425-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.2,5X90MM	
	5861425-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.2,5X130MM	
	5861425-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.2,5X190MM	
	5861425-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.2,5X240MM	
	5861425-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.2,5X300MM	
	5861429-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.2,9X90MM	
	5861429-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.2,9X130MM	
	5861429-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.2,9X190MM	
	5861429-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.2,9X240MM	
	5861429-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.2,9X300MM	
	5861435-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.3,5X90MM	
	5861435-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.3,5X130MM	
	5861435-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.3,5X190MM	
	5861435-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.3,5X240MM	
	5861435-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO APC SÃO INDICADAS PARA TODOS OS DESBRIDAMENTOS GERAIS DE TECIDOS MOLES, ESPECIALMENTE MENISCECTOMIA E CONDROPLASTIA.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.2,0X90MM	
	5861420-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.2,0X130MM	
	5861420-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.2,0X190MM	
	5861420-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.2,0X240MM	
	5861420-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.2,0X300MM	
	5861425-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.2,5X90MM	
	5861425-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.2,5X130MM	
	5861425-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.2,5X190MM	
	5861425-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.2,5X240MM	
	5861425-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.2,5X300MM	
	5861429-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.2,9X90MM	
	5861429-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.2,9X130MM	
	5861429-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.2,9X190MM	
	5861429-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.2,9X240MM	
	5861429-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.2,9X300MM	
	5861435-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.3,5X90MM	
	5861435-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.3,5X130MM	
	5861435-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.3,5X190MM	
	5861435-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.3,5X240MM	
	5861435-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO CM SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO DE MENISCO E DESBRIDAMENTO ARTICULAR

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.2,0X90MM	
	5861420-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.2,0X130MM	
	5861420-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.2,0X190MM	
	5861420-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.2,0X240MM	
	5861420-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.2,0X300MM	
	5861425-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.2,5X90MM	
	5861425-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.2,5X130MM	
	5861425-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.2,5X190MM	
	5861425-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.2,5X240MM	
	5861425-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.2,5X300MM	
	5861429-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.2,9X90MM	
	5861429-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.2,9X130MM	
	5861429-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.2,9X190MM	
	5861429-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.2,9X240MM	
	5861429-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.2,9X300MM	
	5861435-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.3,5X90MM	
	5861435-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.3,5X130MM	
	5861435-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.3,5X190MM	
	5861435-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.3,5X240MM	
	5861435-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.2,0X90MM	
	5861420-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.2,0X130MM	
	5861420-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.2,0X190MM	
	5861420-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.2,0X240MM	
	5861420-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.2,0X300MM	
	5861425-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.2,5X90MM	
	5861425-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.2,5X130MM	
	5861425-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.2,5X190MM	
	5861425-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.2,5X240MM	
	5861425-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.2,5X300MM	
	5861429-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.2,9X90MM	
	5861429-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.2,9X130MM	
	5861429-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.2,9X190MM	
	5861429-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.2,9X240MM	
	5861429-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.2,9X300MM	
	5861435-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.3,5X90MM	
	5861435-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.3,5X130MM	
	5861435-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.3,5X190MM	
	5861435-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.3,5X240MM	
	5861435-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.2,0X90MM	
	5861420-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.2,0X130MM	
	5861420-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.2,0X190MM	
	5861420-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.2,0X240MM	
	5861420-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.2,0X300MM	
	5861425-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.2,5X90MM	
	5861425-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.2,5X130MM	
	5861425-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.2,5X190MM	
	5861425-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.2,5X240MM	
	5861425-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.2,5X300MM	
	5861429-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.2,9X90MM	
	5861429-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.2,9X130MM	
	5861429-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.2,9X190MM	
	5861429-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.2,9X240MM	
	5861429-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.2,9X300MM	
	5861435-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.3,5X90MM	
	5861435-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.3,5X130MM	
	5861435-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.3,5X190MM	
	5861435-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.3,5X240MM	
	5861435-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.2,0X90MM	
	5861420-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.2,0X130MM	
	5861420-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.2,0X190MM	
	5861420-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.2,0X240MM	
	5861420-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.2,0X300MM	
	5861425-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.2,5X90MM	
	5861425-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.2,5X130MM	
	5861425-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.2,5X190MM	
	5861425-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.2,5X240MM	
	5861425-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.2,5X300MM	
	5861429-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.2,9X90MM	
	5861429-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.2,9X130MM	
	5861429-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.2,9X190MM	
	5861429-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.2,9X240MM	
	5861429-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.2,9X300MM	
	5861435-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.3,5X90MM	
	5861435-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.3,5X130MM	
	5861435-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.3,5X190MM	
5861435-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.3,5X240MM		
5861435-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.3,5X300MM		



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.2,0X90MM	
	5861420-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.2,0X130MM	
	5861420-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.2,0X190MM	
	5861420-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.2,0X240MM	
	5861420-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.2,0X300MM	
	5861425-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.2,5X90MM	
	5861425-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.2,5X130MM	
	5861425-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.2,5X190MM	
	5861425-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.2,5X240MM	
	5861425-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.2,5X300MM	
	5861429-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.2,9X90MM	
	5861429-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.2,9X130MM	
	5861429-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.2,9X190MM	
	5861429-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.2,9X240MM	
	5861429-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.2,9X300MM	
	5861435-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.3,5X90MM	
	5861435-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.3,5X130MM	
	5861435-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.3,5X190MM	
5861435-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.3,5X240MM		
5861435-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.3,5X300MM		



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.2,0X90MM	
	5861420-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.2,0X130MM	
	5861420-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.2,0X190MM	
	5861420-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.2,0X240MM	
	5861420-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.2,0X300MM	
	5861425-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.2,5X90MM	
	5861425-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.2,5X130MM	
	5861425-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.2,5X190MM	
	5861425-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.2,5X240MM	
	5861425-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.2,5X300MM	
	5861429-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.2,9X90MM	
	5861429-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.2,9X130MM	
	5861429-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.2,9X190MM	
	5861429-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.2,9X240MM	
	5861429-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.2,9X300MM	
	5861435-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.3,5X90MM	
	5861435-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.3,5X130MM	
	5861435-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.3,5X190MM	
	5861435-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.3,5X240MM	
	5861435-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.3,5X300MM	



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.2,0X90MM	
	5861420-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.2,0X130MM	
	5861420-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.2,0X190MM	
	5861420-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.2,0X240MM	
	5861420-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.2,0X300MM	
	5861425-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.2,5X90MM	
	5861425-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.2,5X130MM	
	5861425-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.2,5X190MM	
	5861425-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.2,5X240MM	
	5861425-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.2,5X300MM	
	5861429-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.2,9X90MM	
	5861429-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.2,9X130MM	
	5861429-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.2,9X190MM	
	5861429-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.2,9X240MM	
	5861429-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.2,9X300MM	
	5861435-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.3,5X90MM	
	5861435-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.3,5X130MM	
	5861435-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.3,5X190MM	
	5861435-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.3,5X240MM	
	5861435-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.3,5X300MM	

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.2,0X90MM	
	5861420-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.2,0X130MM	
	5861420-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.2,0X190MM	
	5861420-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.2,0X240MM	
	5861420-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.2,0X300MM	
	5861425-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.2,5X90MM	
	5861425-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.2,5X130MM	
	5861425-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.2,5X190MM	
	5861425-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.2,5X240MM	
	5861425-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.2,5X300MM	
	5861429-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.2,9X90MM	
	5861429-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.2,9X130MM	
	5861429-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.2,9X190MM	
	5861429-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.2,9X240MM	
	5861429-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.2,9X300MM	
	5861435-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.3,5X90MM	
	5861435-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.3,5X130MM	
	5861435-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.3,5X190MM	
5861435-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.3,5X240MM		
5861435-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.3,5X300MM		

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Imagem ilustrativa Engate	Código	Descrição	Imagem ilustrativa Ponta
	5861420-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.2,0X90MM	
	5861420-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.2,0X130MM	
	5861420-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.2,0X190MM	
	5861420-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.2,0X240MM	
	5861420-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.2,0X300MM	
	5861425-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.2,5X90MM	
	5861425-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.2,5X130MM	
	5861425-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.2,5X190MM	
	5861425-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.2,5X240MM	
	5861425-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.2,5X300MM	
	5861429-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.2,9X90MM	
	5861429-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.2,9X130MM	
	5861429-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.2,9X190MM	
	5861429-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.2,9X240MM	
	5861429-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.2,9X300MM	
	5861435-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.3,5X90MM	
	5861435-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.3,5X130MM	
	5861435-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.3,5X190MM	
5861435-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.3,5X240MM		
5861435-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.3,5X300MM		

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

IDENTIFICAÇÃO DAS LEGENDAS	
CMA = Ponta de Corte de Menisco Agressivo	BO-12 = Ponta Broca Oval 12AF
INC = Ponta Corte Incisivo	BO-SP = Ponta Broca Oval sem Proteção
RPC = Ponta Ressector de Perfil Completo	BR-6 = Ponta Broca Esférica 6AF
API = Ponta Corte Completo Incisivo	BR-12 = Ponta Broca Esférica 12AF
APC = Ponta Agressiva de Perfil Completo	BR-SP = Ponta Broca Esférica sem Proteção
RPC II = Ressector de Perfil Completo II	BC = Ponta Broca Cônica
CM = Ponta de Corte de Menisco	BC-SP = Ponta Broca Cônica sem Proteção
BO-6 = Ponta Broca Oval 6AF	BA = Ponta Broca Afiada

Indicação e Finalidade

As Lâminas de Shaver são indicadas para cirurgias artroscópicas para ressecção de tecidos moles, ressecção de ossos, e meniscectomia.

A finalidade das lâminas é ser utilizadas para perfuração, sinovectomia ou corte, raspagem intra-articular e uniformização de tecido ósseo e cartilaginoso.

Contraindicações

Não se aplica

Princípio de Funcionamento/Mecanismo de Ação

As Lâminas de Shaver são compostas por duas cânulas: Cânula Guia (externa) e Cânula de Sucção e Corte (interna), posicionadas coaxialmente.

Cada cânula possui em sua extremidade partes poliméricas que servem de engate para conexão com a peça de mão (Shaver).

As Lâminas de Shaver são compatíveis com peças de mão (Shaver) da ConMed Linvatec, Smith&Nephew Dyonics, Razek e Stryker Fórmula. Desta forma, as lâminas devidamente conectadas, passam a desenvolver os movimentos de rotação para início de desempenho.

A cânula externa não apresenta movimento e a cânula interna apresenta movimento rotatório. Esse movimento rotatório promove a ação de corte desejada ao entrar em contato com o tecido.

As cânulas possuem uma abertura frontal com borda lisa, dentada ou outra geometria, permitindo diversos tipos de corte e a sucção dos tecidos através da parte canulada.

Modo de Uso do Produto

O produto é projetado para ser utilizado exclusivamente em procedimentos artroscópicos conduzidos por médicos especialistas neste tipo de intervenção.

Após a retirada da embalagem, o produto é conectado pelo seu engate traseiro a uma peça de mão compatível, e de escolha do médico especialista.

O cirurgião controla a direção e velocidade de rotação das lâminas, bem como a duração e intensidade do contato, de acordo com sua experiência, tipo de tecido e outros parâmetros para obter o efeito desejado.

Conforme a Resolução RE nº 2605, de 11/08/06, Lâmina de Shaver com diâmetro interno menor que 3mm são enquadrados como de uso único e são proibidos de serem reprocessados e devem ser descartadas após o uso.

As lâminas devem ser descartadas em locais apropriados, de forma a evitar a contaminação do meio ambiente e demais indivíduos. Recomenda-se a adoção dos regulamentos legais locais para descarte de produtos potencialmente contaminantes (RDC 222 de 2018 - Resíduo Hospitalar).

Produto Médico de Uso Único – Não Reutilizar.

Composição

O tubo das cânulas, uma externa e uma interna, são fabricados com Aço Inoxidável AISI 304, as pontas são fabricadas com Aço Inoxidável XM-16, e o engate traseiro é fabricado com polímeros termoplásticos (ABS/PC), e cumprem com as seguintes normas:

- NBR 13911 - Instrumental cirúrgico - Material metálico - Especificações para aços inoxidáveis conformados;
- ASTM F899 - *Standard Specification for Wrought Stainless Steels for Surgical Instruments*.

Esterilização

As Lâminas de Shaver são esterilizadas por Óxido de Etileno – ETO.

Validade: 5 anos da data de fabricação.

Produto passível de reprocessamento. Entretanto a Empresa recomenda o Uso Único.

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em local seco e fresco, protegido do calor excessivo e da luz do sol direta.

Recomendamos estocar o produto em temperaturas entre 5°C a 40°C.

Mantenha o produto distante de objetos cortantes ou pontiagudos.

O produto não deve ser armazenado diretamente ao chão, recomendamos o uso de prateleiras com 20 cm de distância do piso. Evitar empilhar mais do que 10 caixas.

Transporte

O produto deve ser transportado e acondicionado sempre protegido contra todo tipo de umidade, sujeira e contato com substâncias inflamáveis, corrosivas, tóxicas ou explosivas.

O produto deve ser transportado em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação.

O produto deve ser transportado de forma que sua embalagem permaneça intacta até o momento do uso.

Evitar colocar peso sobre as caixas, deformando as embalagens.

Manuseio do Produto

As lâminas são fornecidas estéreis.

A embalagem deve ser aberta apenas no momento do uso, em ambiente cirúrgico e manipulada com luvas, evitando o contato com outros materiais.

Caso a embalagem esteja danificada ou violada, não utilizar o produto e efetuar descarte de acordo com as normas hospitalares.

O produto é de uso único e não deve ser reutilizado, devendo ser descartado após o uso.

Advertências

- Produto estéril.

- Conforme a Resolução RE nº 2605, de 11/08/06, Lâmina de Shaver com diâmetro interno menor que 3mm são enquadrados como de uso único e são proibidos de serem reprocessados e devem ser descartadas após o uso.

- Verificar a integridade da embalagem antes do uso. Não utilizar caso a embalagem esteja aberta, danificada ou violada, ou om prazo de validade vencido.

- O produto deve estar íntegro para sua utilização, portanto recomendamos a análise do produto e caso apresente qualquer tipo de alteração como marcas de esforço mecânico, torto ou qualquer alteração visível, o mesmo deve ser descartado imediatamente.

- Testar o produto antes da sua utilização no paciente. Em caso de som ou vibração excessiva, ou aquecimento, não utilize o produto.

- Utilizar somente com irrigação do local de uso e sucção para o adequado arrefecimento da lâmina e evitar o travamento por acúmulo de material extraído do interior da lâmina.

- A carga lateral excessiva não melhora o corte e pode originar um aumento do desgaste da lâmina e até mesmo o travamento durante o uso.

- Não aplique ou exerça força de alavanca nas lâminas.

- Em caso de vibração ou som excessivo, aquecimento e/ou travamento durante o uso, interrompa imediatamente o procedimento e troque o produto. A continuidade do uso do produto travado pode deixar resquícios de metal na cavidade.

- O produto só deve ser utilizado por médicos cirurgiões qualificados, que possuam o conhecimento e a experiência necessários para a devida utilização do produto, conhecimento de manuseio de produtos estéreis e, principalmente, da importância de se manter um ambiente totalmente estéril nas salas de cirurgia, onde o cuidado e precaução com cada detalhe são fundamentais para que não haja riscos de contaminação.

Precauções

- Antes de utilizar o produto, o cirurgião deve ler atentamente as instruções de uso que o auxiliarão no uso correto e seguro, além de proteger contra possíveis riscos. Alertamos que é necessário observar a

correlação entre a versão da Instrução de Uso disponível no site, ou impressa, com a versão indicada no rótulo do produto.

- Teste primeiramente a lâmina fora do paciente, nos modos e velocidades de trabalho.
- Não permita que a lâmina entre em contato com outros instrumentos durante o uso.
- Evitar utilizar por mais de 1 minuto seguido para evitar o aquecimento excessivo da lâmina.
- Utilizar nas velocidades e direções indicados ou na menor velocidade possível para obter o efeito desejado, diminuindo a possibilidade de falhas.
- Não toque a área de movimento da lâmina com outros instrumentos, utensílios, tecidos e ou partes do corpo. Se isso ocorrer, poderá resultar em quebra, fratura ou dano da lâmina ou do equipamento e dano ao operador.

Efeitos Adversos

Não se aplica.

Reclamação e Atendimento ao Cliente

Todo cliente ou usuário desse dispositivo médico que tiver dúvidas ou queira maiores esclarecimentos sobre os serviços e/ou produtos oferecidos, poderá entrar em contato com a Sartori Instrumentos, Implantes e Fixadores através dos dados para contato contido nas instruções de uso (disponível no site: www.sartori.ind.br/intrucao_uso) e rótulos da embalagem do produto.

Para o envio dos instrumentais ao fabricante para análise, o produto deve estar limpo e estéril. Devem ser utilizadas embalagens que mantenham a integridade física do mesmo. A embalagem deve conter todas as informações necessárias para a identificação do produto, bem como as condições de manuseio, tais como métodos de limpeza e desinfecção utilizados, bem como descrição e número do lote.

FABRICADO POR:

LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA - EPP.

Estrada Municipal RCL 10 Km 9 n.º 13500 - Distrito de Ajapi - Rio Claro - SP

CEP: 13508-000 Tel.: (19) 3538-1910

CNPJ: 04.861.623/0001-00 Indústria Brasileira

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: (19) 3538-1910

e-mail: info@sartori.ind.br

Registro ANVISA nº: 80083650079

Responsável Técnico: Charles Eduardo Ceccato

CREA/SP: 5062635520